

# 心肺复苏模拟人 院前急救人体模型医用cpr橡皮人

产品名称	心肺复苏模拟人 院前急救人体模型医用cpr橡皮人
公司名称	上海尧月医疗科技有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区车墩镇朝阳路20号5幢453室
联系电话	021-57770368 13162687657

## 产品详情

商品名称：超新一代高级全自动电脑心肺复苏模拟人

型号：KAL/CPR490

销售热线：021-57770368

售后电话：13162687657

QQ：2435398830

电子邮箱：2435398830@qq.com

网址：<http://www.yaoyue888.com>

该产品功能进行全面升级，突出CPR训练操作的辅助功能，以及可自行设定各项数值，更加符合临床和教学练习CPR操作要求。

执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR) & 心血管急救(ECC)指南标准

功能特点：

模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

模拟生命体征：

初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。

方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。

方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。

方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。

控制器显示屏功能：

电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：

吹气量过少时，条形码为黄色。

吹气量合适时，条形码为绿色。

吹气量过大时，条形码为红色。

吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：

按压深度过少时，条形码为黄色。

按压深度合适时，条形码为绿色。

按压深度过大时，条形码为红色。

可自行设定操作时间，以秒为单位。

操作频率：2015标准为100-120次/分钟，也可自行设定数值。

电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。）

打印机功能：

操作结束后打印操作过程。

成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注塑而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：

高级复苏全身人体模型一具；

高级显示控制器一台；

豪华手拉推式人体硬塑箱一只；

复苏操作垫一条；

电源适配器一根；

数据线一根；

屏障面膜(50张/盒)一盒；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

热敏打印纸二卷；

2015国际最新操作指南光盘1盘；

急救手册 1 本；

使用说明书一本；

保修卡、合格证；

咨询电话：021-57770368 我们可以帮您推荐符合您要求的相关产品！