

心肺复苏模拟人CPR心肺复苏模型 急救模拟人

产品名称	心肺复苏模拟人CPR心肺复苏模型 急救模拟人
公司名称	上海尧月医疗科技有限公司
价格	9300.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区车墩镇朝阳路20号5幢453室
联系电话	021-57770368 13162687657

产品详情

商品名称：高级中屏幕液晶自动电脑心肺复苏模拟人

型号：KAL/CPR580

销售热线：021-57770368

售后电话：13162687657

QQ：2435398830

电子邮箱：2435398830@qq.com

网址：<http://www.yaoyue888.com>

商品名称：高级中屏幕液晶自动电脑心肺复苏模拟人

型号：KAL/CPR580

该产品采用美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准，经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力，率先开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的高档型第七代新产品，其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先产品。

择执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准

主要功能：

模拟标准气道开放显示、语言提示；

人工呼吸及胸外按压时液晶屏上：心电模拟动态显示；模拟心脏动态显示；

人工手位胸外按压指示灯显示、数码计数显示、语言提示：

按压位置正确、错误的指示灯显示；数码计数显示；错误的语言提示。

按压强度正确（5~6cm区域）、错误（<5cm<区域）的显示分别由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。

人工口对口呼吸（吹气）的指示灯显示、数码计数显示、语言提示：

吹入的潮气量 500ml~600ml 的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示。

吹入潮气量过快或超大，数码计数显示；错误语言提示。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作。

操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟。

操作方式：训练操作；考核操作。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏答应成绩单。

检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化的真实体现。

检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真是体现。

材料特点：

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发、采用井口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实。肤色统一、心态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：

高级肤色全身人体模型一具；

高级电脑中屏幕数码液晶显示器一台；

豪华手拉推式人体硬塑箱一只；

复苏操作垫一条；

屏障面膜（50张/盒）一盒；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

热敏打印纸二卷；

保修卡、合格证；

使用手册一本；

2015国际最新操作指南光盘1盘；

咨询电话：021-57770368 我们可以帮您推荐符合您要求的相关产品！