

# 郑州猪用B超机

产品名称	郑州猪用B超机
公司名称	郑州恒锦莱科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	标配探头:3.5MHz防水机械扇扫 最大探测深度:192mm 图像灰阶:256级
公司地址	郑州市金水区文博东路东、东风路南11幢28层2803号
联系电话	15937117016

## 产品详情

猪用B超机多少钱，母猪B超机厂家直销价格，兽用B超价格。恒锦莱兽用B超供应：羊用B超、牛用B超、猪用B超、小动物B超、犬（狗）用B超、宠物B超、兽用X光机、活体背膘仪等产品。公司拥有高素质的管理人才、和科研人才完善的生产设备和检测设备，通过国际合作，引进世界先进技术及关键零部件向各畜牧机构提供技术领先，质量可靠的兽用B型超声诊断仪等兽用影像产品，致力打造未来中国兽医影像行业引领者。

固话（传真同步）：0371-55696921

电话（微信同步）：15937117016

QQ: 1961470981

后备母猪动情前期促性腺激素诱导卵泡成熟。在垂体促性腺激素作用下排卵前卵泡在卵巢上发育，在雌激素的影响下，可以通过猪用B超看到母猪卵巢上有卵泡的发育。分泌大量雌激素，从而影响血浆中雌激素浓度。从而可以了解到后备母猪发情期内LH浓度比不发情高。

使用方法：被检测母猪可在限饲栏内自由站立或侧卧、于其大腿内侧、最后乳头外侧腹壁上进行探查。探查时只需把探头涂上耦合剂，然后贴在下腹壁上即可。探查时无任何损伤和刺激，具有探查时间短、无应激、准确率高的特点。图象直观，当看到黑色的孕囊暗区或者胎儿骨骼影像即可确认早孕阳性。早孕监测最早在配种后23天即可进行,22天时妊娠监测的准确率可,达100%。

兽用B超BXL-M1特点：手持式结构，灵巧方便，操作简单；5英寸TFT-LCD显示和可编程器件（FPGA）以及表面安装技术（SMT），整机体积小、重量轻。

功能：检测怀孕

特点：

1. 手持式结构，灵巧方便，操作简单。

2. 采用5英寸TFT-LCD显示和可编程器件（FPGA）以及表面安装技术（SMT），整机体积小、重量轻。

3. PAL-D制视频输出。

功能：检测怀孕

技术参数：

标配探头：3.5MHz防水机械扇扫

显示深度(mm)：192

最大探测深度(mm)：192

分辨力（mm）：侧向： 4（深度 80）

5（80 < 深度 130）

轴向： 2（深度 80）

盲区（mm）： 8

几何位置精度（%）：横向 20

几何位置精度（%） 10

监视器尺寸（英寸）：5.0 TFT-LCD

显示模式：B、B+B、B+M、M

图像灰阶：256级

图像倍率：×1.0, ×1.2, ×1.5, ×2.0

测量功能：距离，周长，面积，心率，孕龄（猪、牛、马、羊、猫、狗）

字符显示：病例编号，性别，年龄

电池容量：2200mAh

主机功耗：非充电工作情况 13W/充电工作情况 25W

适配器功耗：45W

母猪如果经过治疗还是不能进行配种妊娠的话就要被淘汰，猪用B超机检测哪些母猪应该会被淘汰？通过

猪用B超机观察后备母猪，在体重75kg以后没有及时补充生殖营养，生殖器官错过了最佳发育时机，即使在猪用B超机上发现膘情不错也不发性。采取的措施，对营养不足，体制瘦弱的增加营养，催情补料。猪用B超机检查母猪过肥，体内沉积了大量脂肪，致使身体过肥胖，猪用B超机上就会发现卵巢内脂肪浸润，卵泡上皮脂肪多变性，卵泡萎缩而不能正常自然发情配种。母猪哺乳期间过度掉膘消瘦，体况恢复不良或长期使用脱霉剂导致生殖营养严重不足，母猪出现脱皮、长毛、毛血等。则表现发情延后，发情不明显或不发情。管理方式粗放，养猪环境脏、乱、差、紧。免疫无序，猪场没有固定的免疫程序，猪用B超机观察只在猪得病之后才想起来没有做好防疫措施。饲料营养不均衡、不安全，不适合猪现阶段的生长发育。不注重母猪和仔猪的营养与保健不注重猪场生物安全，养猪无关人员随意进出猪场，都是特别养猪贩子更易带来传染性疾病，具有以上症状的母猪如果还是不采取措施进行治疗的话就应该会被淘汰。

。