

一次性留置针贴膜

产品名称	一次性留置针贴膜
公司名称	山东长运医药用品有限公司
价格	.50/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市开发区民营院民祥路192号
联系电话	86-0533- 13953305478 13953305478

产品详情

ransparent semi-permeable dressing

医用透明敷料

产品构成： product composition

由PU 膜涂覆医用压敏胶，两面有离型材料保护。

产品性能 product performance

1.透气：特制的半透膜，能与皮肤保持同步呼吸，提供上皮细胞再生的湿润环境，抑制痂皮形成，加速伤口愈合。

2.透明：超薄透明，便于观察伤口愈合状况，适于敷贴身体的任何部位，顺应性好，舒适自然

3.防水防菌：防止水，细菌，以及污垢侵入伤口，不妨碍日常生活（如洗澡等）

4.低致敏，粘性适中：品质优良的医用压敏胶，粘性适中，不刺激伤口，揭除时不伤皮肤。

用途 Usage

1.留置针，静脉导管的固定

2.轻微擦伤，小面积的、度烧伤及较小的伤口的保护

3.褥疮，皮肤皴裂的预防治疗

4.供皮区的保护

5.术后切口和撕裂伤的一般保护

使用说明 instruction

1.将伤口清理消毒后，从包装袋中取出敷料

2.从印字一面，揭去离型纸，露出胶面

3.将胶面贴到皮肤上，从中间向四周抹平

4.揭去背面的离型材料

5.当擦伤，烧伤及手术后产生少量渗出液时，在清理伤口后将无菌纱布或吸收垫以及消炎药物敷于伤口，然后在敷上无菌敷料。

注意事项 Note

1, 无菌, 一次性使用

Sterile, disposable

2. 包装袋破损禁止使用

3. 不能代替缝合, 止血, 皮肤消毒等措施

4. 不能用于动脉导管固定

5. 伤口已感染, 溃疡禁用。如伤口后来出现感染如肿胀, 出血, 渗液以及发热等情况, 应该根据医生诊断停止使用或增加更换频率。

6. 应选择合适规格的敷贴, 自然敷贴与皮肤上, 不得牵拉以造成张力, 损伤皮肤。

7. 除去敷料时, 注意覆盖其下的导管或其他器械不被扯掉。