

银离子伤口敷贴

产品名称	银离子伤口敷贴
公司名称	山东长运医药用品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市开发区民营院民祥路192号
联系电话	86-0533- 13953305478 13953305478

产品详情

银离子伤口敷贴 silver ion wound dressing

产品介绍：银离子伤口敷贴是采用当今高新技术制成的一种含银离子的新型功能敷贴，具有抗菌抑菌，减少疼痛，减少疤痕的形成，有效促进伤口愈合的功能。

产品性能：

Product performance 1. 抗菌抑菌：带正电荷的银离子与细菌蛋白酶中的带负电荷巯基发生反应，蛋白质因巯基的丧失而迅速失去活性，从而导致细菌无法进行分裂繁殖而被杀灭。也可以与病原体细胞的DNA结合，结合后彼此形成交叉链接，导致病菌的DNA变性，抑制其复制，从而杀灭病原菌，病毒等。

[英][p dn][美][p dn]

n.病菌，病原体;

[英]['varsz][美]['varsz]

n.病毒(virus的名词复数); 病毒性疾病; 恶毒; 恶意;

2. 促进愈合，减少疤痕：银离子可以增加创面的钙含量，降低创面锌含量，改善创伤周围组织的微循环，有效激活并促进组织细胞的增生，加速伤口愈合，减少疤痕的形成。

3. 透气：水刺无纺布的网状结构能使皮肤自然呼吸，排除水汽汗液，有效减少伤口感染发生。

4. 低致敏，粘性适中：品质优良的医用压敏胶，粘性适中，不刺激伤口，揭除敷贴时不伤皮肤。覆有网膜的吸水垫无粘性，网膜只透湿，不返渗，吸水垫能有效吸收渗出物，不粘贴伤口，揭除时无痛感。

使用方法 Usage:

1. 将伤口清理消毒后，从包装袋中取出无菌敷贴
2. 从印字一面，揭去离型纸，露出胶面。
3. 将胶面贴到皮肤上，从中间向四周抹平。
4. 如遇复杂伤口，请在专业医护人员的指导下使用。

注意事项 Note

1, 无菌, 一次性使用

2. 包装袋破损禁止使用

3. 不能代替缝合, 止血, 皮肤消毒等措施

4. 不能用于动脉导管的固定

5. 伤口已感染, 溃疡禁用。如伤口后来出现感染如肿胀, 出血, 渗液以及发热等情况, 应该根据医生诊断停止使用或增加更换频率。

6. 应选择合适规格的敷贴, 自然敷贴与皮肤上, 不得牵拉以造成张力, 损伤皮肤。

7. 除去敷料时, 注意覆盖其下的导管或其他器械不被扯掉。

