

# 厂家供应一次性无菌防护套显微镜套腹腔镜套电钻套

产品名称	厂家供应一次性无菌防护套显微镜套腹腔镜套电钻套
公司名称	衡阳市环誉医疗设备有限公司
价格	150.00/个
规格参数	环誉:250*120 腹腔镜套:180*20 湖南:衡阳
公司地址	湖南省衡阳市珠晖区和平乡和平村长塘组
联系电话	0734-8210891 18173413621

## 产品详情

本产品为一次性医用产品，其主要用于手术显微镜的无菌隔离防护和防止交叉感染。主要材质为聚乙烯薄膜。该产品系无菌包装，术前将其直接套在仪器上，可充分保证术部无菌环境。术后一次性清除，具有方便、清洁减少了医务人员的工作强度的优点，优化了操作程序的效率，有效节约了仪器维护及导线更换的开支，保证每台手术的安全性和病患的手术安全。

### 【产品性能】

- 1、术前将其直接套在导线或仪器上，可充分保证术部无菌环境；
- 2、术后一次性清除，具有方便、清洁减少了医务人员的工作强度的优点，有效节约了仪器维护及导线更换的开支。

【适用科室】放射科、手术室

【适用范围】主要用于任何需要无菌隔离保护的手术显微镜设备的防

【手术显微镜保护套操作流程】1、取下显微镜保护套、镜头盖。

- 2、放松底座的刹车装置，收拢各节横臂，旋紧制动手轮，推至手术床边。
- 3、插上电源插座，接通电源，再开显微镜开关，检查功能是否正常，灯亮即可。
- 4、用无菌透明保护套把显微镜的镜头及前臂包好，再将保护套上镜头套在物镜上，尽量套紧，防止光源给镜片造成反光点。再把保护镜头两边松紧带找寻任向上的两点位挂上。
- 5、把要使用的主目镜及副目镜套好，撕开不干胶固定好位子。把另一边不用的收起。

- 6、用镜套上带的两个腰条把机身收紧，撕开不干胶固定好。
- 7、根据手术部位安放显微镜，满意后将底座的刹车刹牢并将各制动轮旋紧。
- 8、手术开始，协助术者调节镜头至功能位，只需扭动横臂上的黑色钮，光源的调节应从最小的亮度开始，调至合适；根据术者的瞳距和眼睛的屈光度进行调节，再调物镜焦距达最大清晰度。
- 9、手术结束，巡回护士先关显微镜开关，最后撤离电源，扣上镜头盖，套上显微镜保护套，整理归位。

#### 【注意事项】

- 1、在手术过程中，如手术器械碰到保护套镜头的镜片，不要去擦拭镜片，防止影响镜片的透明度。
- 2、显微镜应防止震动和撞击，应固定手术间，避免反复移动。套显微镜保护套时必须2人同步操作，按无菌物品操作手册执行。
- 3、使用完毕，透镜表面定期用脱脂棉蘸无水酒精擦拭，保持干净。用显微镜保护套套住显微镜，保持光学系统的清洁。

#### 【产品特点】

带镜头：防止手术器械碰撞镜头导致病人产生感染；

全封闭：更好隔绝病菌预防交叉感染，保护设备；

人性化设计：已设计主副镜，使用起来更方便；

材质优良：主要材料是用进口原材料加工成无毒害聚乙烯透明薄膜，镜片采用进口的光学材料，能达到光学镜片的要求，视野清晰。