

# 深圳洗鼻器厂家|支持OEM和ODM加工生产

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 深圳洗鼻器厂家 支持OEM和ODM加工生产                    |
| 公司名称 | 深圳市飞猫电器有限公司                              |
| 价格   | 588.00/台                                 |
| 规格参数 | 支持:OEM和ODM<br>厂家:深圳市耐菲尔医疗器械有限公司<br>地址:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道龙王庙工业区第28/30栋                  |
| 联系电话 | 075527298495 18814482489                 |

## 产品详情

深圳市耐菲尔医疗器械有限公司是一家专业生产洗牙器，洗鼻器的公司，公司规模在行业内排行，质量实力保证，支持OEM和ODM加工生产，同时面向全国诚招代理经销商。

洗鼻器介绍：

洗鼻器是一种用于清洗鼻腔的工具。

它通常借用一定压力（或气囊式洗鼻器、或用重力如简单瓶罐式、或用机械压力如电动式）

将生理盐水送入鼻孔，流经鼻前庭（露在头部外面的部分）、鼻窦、鼻道绕经鼻咽部，或从一侧鼻孔排出，或从口部排出。

通过以上路径，借助于生理盐水自身的杀菌作用及水流的冲击力，将鼻腔内已聚集的致病及污垢排出，从而使鼻腔恢复正常的生理环境，

恢复鼻腔的自我排毒功能，达到保护鼻腔的目的。

洗鼻器使用方法：

- 1、将适宜温水倒入本品的水箱里，加入适量的洗鼻盐（浓度配比建议为：4.6g洗鼻盐/500ml温水），坚持使用固定浓度配比的盐水洗鼻可减少对鼻腔粘膜的刺激与不适；
- 2、将鼻腔喷头安装在本品的喷水手柄上，并将喷水压力调至低档；

- 3、弯腰、低头、张嘴，头部向左倾斜45度，用嘴呼吸（冲洗的时候屏住呼吸），将鼻腔喷头堵住右侧鼻孔打开开关开始洗鼻。适应低档水压后逐步将档位调高到自己感觉舒适的水流速度与压力。清洗一段时间后再将头部向右倾斜45度，将喷头堵住左侧鼻孔清洗（每侧各清洗250ml洗鼻盐水为佳）；
- 4、洗鼻后，头向前倾斜，深呼吸几次，几分钟内鼻腔内的残余盐水会逐步流出。切记不要强行擤鼻，因为鼻咽管的水可能会进入耳道，即使不慎少量进入耳道和口腔也无妨，盐水不是药物，没有副作用；
- 5、完成洗鼻后将水压调到大，用温水使机器循环两次，自然晾干后收纳妥善以备下次使用；
- 6、初次使用者建议两次，早晚各一次，后期可根据自身鼻腔的舒适程度适当减少。