

便携式兽用B超

产品名称	便携式兽用B超
公司名称	郑州博祥来电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区东风路与博东路交叉品
联系电话	0371-55696921 18337173261

产品详情

兽用B超BXL-M1利用换能器（探头）经压电效应发射出高频超声波透入机体组织产生回声，回声又被换能器接收变成高频电信号后传送给主机，经放大处理后于荧光屏上显现出被探查部位的切面声像图的一种高科技影像诊断技术，是由博祥来邓立新教授率领其团队研发而成一款检测猪、羊、狗等动物繁殖怀孕的仪器设备。BXL-M1的功能比较单一，主要测动物是否怀孕及怀孕的周期。

一、兽用B超BXL-M1主要技术参数： 标配探头：3.5MHz防水机械扇扫 显示深度(mm)

: 192 大探测深度(mm) : 192 分辨力 (mm) : 侧向 : 4 (深度 80) 5(80 < 深度

130) 轴向 : 2 (深度 80) 盲区 (mm) : 8 几何位置

精度 (%) : 横向 20 几何位置精度 (%) 10 监视器尺寸 (英寸) : 5.0 TFT-

LCD 显示模式 : B、B+B、B+M、M

图像灰阶：256级 图像倍率：×1.0, ×1.2, ×1.5, ×2.0 测量功能：距离，周长，面积，心率，孕龄（猪、牛、马、羊、猫、狗） 字符显示：病例编号，性别，年龄 电池容量：2200mAh 主机功耗：非充电工作情况 13W/充电工作情况 25W 适配器功耗：45W

二、兽用B超BXL-M1四大特点：1、便携式结构，灵巧方便，操作简单.2、采用5英寸TFT-LCD显示和可编程器件（FPGA）以及表面安装技术（SMT），整机体积小、重量轻.3、PAL-D制视频输出：电视调谐器；频道数；内置电视调谐器；输出设置.4、高效、准确率达100%.三、兽用B超BXL-M1主要对象：猪、羊、狗应用范围：养殖场、屠宰场、检疫部门、宠物医院、畜禽运输部门等四、兽用B超BXL-M1使用方法：1、猪测孕：被检母猪可在限饲栏内自由站立或侧卧、于其大腿内侧、后乳头外侧腹壁上进行探查。探查时只需把探头涂上耦合剂，然后贴在下腹壁上即可。探查时无任何损伤和刺激，具有探查时间短、无应激、准确率高的特点。图象直观，当看到黑色的孕囊暗区或者胎儿骨骼影像即可确认早孕阳性。早孕监测早在配种后23天即可进行,22天时妊娠监测的准确率可,达100%。

2、羊测孕：被检母羊可在限饲栏内自由站立或侧卧、于其大腿内侧、后乳头外侧腹壁上进行探查。探查时只需把探头涂上耦合剂，然后贴在下腹壁上即可。探查时无任何损伤和刺激，具有探查时间短、无应激、准确率高的特点。图象直观，当看到黑色的孕囊暗区或者胎儿骨骼影像即可确认早孕阳性。早孕监测早在配种后30天即可进行准确率可,达100%。

五、兽用B超BXL-M1配置： 主机 3.5MHZ机械扇扫防水探头 电源适配器 铝合金箱体 学习光碟 说明书、保修卡、合格证六、兽用B超BXL-M1质量承诺与售后服务条款： 注意：非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修范围内。 提示：请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。 产品自购买

日起90天内有质量问题包换新机，一年内凭保修卡维修。七、产品销售区域：

县级及以上城市均可货到付款；如需上门培训客户可先预付定金，培训老师带机器上门培训，培训结束收取剩余款项

凡是购买博祥来兽用B超BXL-

M1的客户，免费提供技术培训服务。在产品购买之后，三个月之内免费换新，一年保修，终身维护。博祥来本着客户至上的服务理念，从客户的切身利益有出发点，研发更科学的兽用B超机，提高客户的生产效益