

兽用B超 兽用 B 超仪

产品名称	兽用B超 兽用 B 超仪
公司名称	郑州博祥来电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区东风路与博东路交叉品
联系电话	0371-55696921 18337173261

产品详情

兽用B超 兽用 B 超仪特点：

- 1、采用超大规模FPGA，同时使用多通道高性能放大器，多通道集成超声发射技术，电路结构简洁高效，可靠性得到了有效提高。
- 2、本仪器采用数字声束形成技术，使图像清晰细腻，分辨率高。
- 3、采用先进的探头生产技术，多层声匹配，频带宽，灵敏度高。
- 4、采用变频发射技术，使图像在近中远场的分辨率提高。
- 5、采用高速CMOS集成电路和低压器件，能耗温升低，可靠性高。
- 6、仪器内置锂离子可充电电池，充满电后电池可以连续工作2个小时以上。
- 7、发射具有多种组合聚焦的选择。
- 8、带有实时时钟，可自动显示日期、时间。
- 9、轻巧，方便。
- 10、丰富的软件功能，更加适应用户需要。

兽用B超 兽用 B 超仪技术参数：

探头	3.5C8060L-3.5M	5.0C8020L-5.0M	6.5C8010L-6.5M	6.5L8040L-7.5M
探测深度	190mm	80mm	50mm	50mm
分辨率	横向 2 mm深度 80mm纵向 1m	横向 1 mm深度 40mm纵向 0.5	横向 1 mm深度 60mm纵向 0.5	横向 1 mm深度 60mm纵向 0.5

盲区 几何位置精度	m深度 80mm		mm深度 40mm		mm深度 50mm		mm深度 50mm		
	3 mm		3 mm		3 mm		3 mm		
	横向	5%纵向	5	横向	5%纵向	5	横向	5%纵向	5
		%		%		%		%	

兽用B超测孕仪 V20功能：1、检测怀孕、胎仔数；2、猪、牛、犬、马、猫、山羊、骆驼、绵羊的孕周和预产期、距离、周长、面积、心率、胎重。3、检测猪背膘厚度；4、产科疾病检测（包括子宫内膜炎、子宫蓄脓、卵巢囊肿等）使用对象：科研单位、规模化养牛场，人工授精站，饲料/兽药经销商及企业等。配置：标准配置：R60/3.5MHz凸阵探头(或6.5MHz的直肠探头) 可选配置：R20/5.0MHz微凸探头
3.5MHz的背膘线性探头使用方法：

牛用B超仪在奶牛中的应用包括体外探查法、阴道探查法和直肠探查法，其中最为适合奶牛检查的就是直肠探查法。先保定奶牛，使其排出宿粪后，用润滑剂润滑探头。操作人员站立在母牛的正后方，打开主机并用左手固定，同时右手持探头深入直肠，先找到母牛生殖器官的大概位置，把探头紧贴在生殖器官的上方进行探查。在检查的过程当中，环境的光照应适度，如光过强应用布罩住显示屏以产生有效的灰影效果。