

一次性使用止血带、医用TPE止血带、输液止血带

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 一次性使用止血带、医用TPE止血带、输液止血带 |
| 公司名称 | 湖南力宾医疗科技有限公司 |
| 价格 | 1000.00/0.35 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浏阳经开区湘台路18号长沙E中心 |
| 联系电话 | 0731-89630768 13787066822 |

产品详情

一次性止血带优质生产工厂-湖南力宾医疗科技有限公司

联系电话：0731-89630768 张经理13787066822

公司主营产品

一次性止血带、医用止血带、一次性使用止血带、一次性医用止血带、一次性输液止血带、TPE止血带、瑜伽带、拉力带、压脉带、卡扣式止血带

产品按照ISO9000要求，通过SGS检测，出口欧美市场，并在美国FDA认证注册

产品信息

一次性非乳胶止血带(LATEX-FREE TOURNIQUET)，可暂时抑制血液流动，因使用卫生，携带方便，价格低廉的优点，已大量替代传统使用的输血胶管，本品可单独使用，亦可配置于各类急救箱内。我厂为专业一次性止血带生产厂家，产品分为非乳胶止血带与TPE止血带两种。

【产品名称】：医用一次性止血带

【产品规格】：2.0cm*35cm 2.0cm*40cm 2.0cm*45cm 2.5cm*40cm 2.5cm*45cm

【产品材质】：本产品采用医用级热塑性弹性体

【尺寸齐全】：有新生儿用、儿童、3/4英寸成人用、1英寸成人用等

【颜色多样】：白色、蓝色、灰色、酞菁蓝、橘黄色等

【产品用途】：广泛应用于医院、血站、各种急救包内。

【产品包装】：盒装点连式、直条型、单条卷状、连抽式

【产品特点】：一次性使用：阻断交叉感染

【生产厂家】：湖南力宾医疗科技有限公司

使用说明：

一、严禁将传染病(如：皮肤病、流行性感、乙肝、伤寒、结核病、爱滋病、非典、淋病、梅毒、麻疹、百日咳、流行性乙型脑炎等)患者使用过的止血带为下一患者使用；以防交叉感染。二、用于常规治疗及救治中输液、抽血、输血、止血时：1、止血带不应扎得太紧，使用时间应尽量缩短。抽血时，见到回血应立即松开止血带。2、血脂项目、凝血项目、血常规项目抽血时止血带使用应限定在1分钟以内。3、止血带束缚太紧、时间过长[如超过3分钟]，会造成血行阻滞时间过长，因溶血、血小板激活、纤溶系统激活等原因将使以上检验项目的结果产生偏差，甚至诱导错误诊治。4、需要重新采血时，在止血带束缚太长的情况下，应当在对侧手臂重新采血。三、肢体出血应急使用时：1、上止血带前，应先将伤肢抬高，促使基中静脉血液流回体内，从而减少血液丢失。2、上止血带的位置尽量靠近出血部位子上臂中段禁止使用止血带，避免压迫而造成桡神经损伤。3、绑止血带时其松紧度以刚压住动脉出血为宜。

湖南力宾医疗科技有限公司是医用止血带、一次性止血带、止血带、医用一次性止血带、一次性使用止血带、压脉带、瑜伽带、拉力带等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。湖南力宾医疗科技有限公司总部位于国家级浏阳经济技术开发区，力宾医疗是一家国际化的一次性止血带和瑜伽拉力带技术及产品解决方案提供商，是一家专注于医疗器械产品、运动健身防护产品，集研发、设计与生产于一体的科技创新企业。

【联系人】：张经理

【联系电话】：13787066822

【联系地址】：中国 湖南 浏阳市 国家级浏阳经济技术开发区湘台路18号长沙E中心

【力宾网址】：www.leebene.cn www.leebene.com leebene.1688.com