

# 阴道填塞给药器厂家

产品名称	阴道填塞给药器厂家
公司名称	济宁东诺医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:九尔 型号:1只装 产地:济宁
公司地址	济宁市建设北路116号
联系电话	0537-6503518 15653706969

## 产品详情

阴道填塞适用于阴道给药用。

### 【作用机理】

阴道填塞（给药器）利用生物材料医用高活性炭纤维的高吸附性、强引流性的特点，吸附阴道内的致病菌、病毒并排出体外，使其回复正常的生理自洁功能。

医用高活性炭纤维其本身内部孔隙结构发达，具有大量肉眼看不见的微孔，1g活性炭材料的微孔，将其展开后表面积可达800-15000平方米，尤其是经过特殊处理之后，这些高度发达的孔隙结构，使活性炭能吸附超过自身20倍以上的物质，从而可以有效的吸附、清除阴道内的致病菌，达到抑菌止痒、清除异味、调节阴道内环境，回复正常的生理状态；并促使手术后的细胞生长、组织再生。

### 【注意事项】

- 1、阴道填塞为一次性使用，请勿重复使用。
- 2、有习惯性流产史的孕妇慎用。
- 3、月经期停用。

### 【使用说明】

阴道放置。白天或睡前均可使用，放置时间5-9小时，每1支：症状严重者每日2支：8天一个疗程。

使用步骤：

1：清洁双手，打开阴道填塞包装，用拇指和中指捏住外导管拉绳反对着身体，先深呼吸，然后轻轻地把外导管推进阴道，如果导管推进去不太容易，可以再推进的同时轻轻旋转导管。

2：当你的手接触到身体时，捏住外导管，用食指将内导管完全推入内导管，使管芯离开导管进入阴道底部。

3：管芯已经推入阴道底部，轻轻地取出内外两支导管弃置，部分拉绳留在体外，更换时捏住拉绳轻轻拉出。上厕所时不要取出。

【产品性能结构】由管腔、推杆、芯体组成。【储存条件、方法】密封，置阴凉处。【有效期限】三年  
【型号规格】阴道填塞型(1支装/盒、2支装/盒、3支装/盒、5支装/盒)【生产企业许可证号】鲁食药械生  
产许20120073号【注册证号】鲁宁食药监械(准)字2014第1660025号【产品标准号】YZB/鲁宁 0023-2014

【企业名称】山东九尔医药生物科技有限公司【注册地址】山东省济宁市神道路7号【生产地址】山东省  
济宁市神道路7号联系人：王经理

联系电话/微信 15653706969

邮箱：[2389834967@qq.com](mailto:2389834967@qq.com)