

一次性医用水凝胶眼贴全国诚招代理量大从优

产品名称	一次性医用水凝胶眼贴全国诚招代理量大从优
公司名称	济宁东诺医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:九尔 型号:齐全 产地:济宁
公司地址	济宁市建设北路116号
联系电话	0537-6503518 15653706969

产品详情

一次性医用水凝胶眼贴全国诚招代理量大从优 "一次性医用水凝胶眼贴

【产品名称】 一次性医用水凝胶眼贴

【型号规格】 222mm × 85mm

【产品描述】 本产品由内外两层无纺布基层和聚乙烯醇水凝胶组成，其中聚乙烯醇水凝胶由聚乙烯醇、琼脂、乳酸钠和水组成。

【主要性能指标】 聚乙烯醇水凝胶含水量为80%~95%，产品经辐照灭菌为无菌。

【适用范围】 贴敷于全麻或深度昏迷病人的眼外部，通过提供相对密闭的潮湿环境，预防暴露性角膜炎。

【注意事项】

1.本品为一次性使用，请勿重复使用。2.包装破损，严禁使用。3.若使用时间较长，建议6~8小时更换一片，且综合生物学评价及生物学试验结果，建议产品最大累计使用时间为72小时。

【禁忌症】 对无纺布或聚乙烯醇水凝胶过敏者、产品对应部位皮肤破损者慎用，眼睑缺损患者禁止使用

。

【使用说明】

- 1.将水凝胶表面离型膜揭去，提取产品两侧提手部位，将产品从托板上揭下，凝胶面与皮肤敷贴、覆盖眼部，使患者双眼分别位于产品透明部分中心位置，外层无纺布中凸部分贴于额头皮肤，将胶带抚平，使其与皮肤粘贴良好。
- 2.建议麻醉诱导期即开始使用本品，提前创造眼部湿润环境，以起到更好的效果。
- 3.若产品的尺寸不合适，可将产品自中间剪开，成为两个单眼部分，分别敷于两眼上，调整位置，使病人双眼位置分别位于产品透明部位中心位置。

【储存条件、方法】密封，置阴凉处，常温贮存，禁止冷冻及避免挤压。

【有效期限】三年（通过加速老化试验确定）

【企业名称】山东九尔实业集团有限公司

【注册地址】山东济宁高新区第十二工业园

【生产地址】山东济宁高新区第十二工业园

联系人：王经理

联系电话/微信 15653706969

邮箱：2389834967@qq.com"