

# 西臣邦尼医用高分子夹板 高分子夹板 医用夹板

产品名称	西臣邦尼医用高分子夹板 高分子夹板 医用夹板
公司名称	江苏西臣邦尼医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	建湖县民营科技创业园4号路88号
联系电话	025-86221732 18851711471

## 产品详情

【产品名称】 医用高分子夹板

【产品型号】 XB212、XB224、XB312、XB320、XB324、

XB328、XB336、XB416、XB420、XB428、XB430、

XB436、XB528、XB530、XB536、XB546、XB548、

XB5180、XB630、XB636、XB646、XB648、XB848

【产品规格】 见技术要求

【产品备案号】 苏盐械备20140007号

【生产备案号】 苏盐食药监械生产备20150002号

【性能与结构】 本产品由纤维布、无纺布和聚氨酯树脂混合制成。

【适用范围】 用于骨科矫形、骨折外固定。

【使用方法】

- 1、根据整形部位的长宽选择合适规格的夹板；
- 2、打开包装袋，把夹板浸入常温20 -25 水中约4-8秒钟，同时用手挤压无纺棉，反复2-3次；
- 3、取出夹板，用手挤压或用干毛巾卷绕夹板，除去多余水份；
- 4、将夹板内侧厚的无纺棉层紧贴皮肤放在需固定的部位

- 5、根据需要塑型，同时用纱布绷带或弹性绷带缠绕固定；
- 6、操作需在3-5分钟内完成，约10分钟左右开始硬化，20分钟后完全固化，30分钟后可定型承重；
- 7、固定部位有皮外伤或需操作更长时间时，夹板可先不浸水，直接用纱布绷带或弹性绷带缠绕固定后在薄外层的无纺布上喷洒水来加速硬化；
- 8、夹板可轻松拆除。

【注意事项】常温、避光保存。

【警 示】如发现产品漏气，硬化后请勿使用。

【生产企业】江苏西臣奥勒医疗科技有限公司

【地 址】江苏省建湖县民营科技园建宝北路108号

#### 规格型号

产品名称	型号	规格(cm)	包装
医用高分子夹板	XB312	7.5*30	120只/箱
医用高分子夹板	XB324	7.5*60	60只/箱
医用高分子夹板	XB336	7.5*90	60只/箱
医用高分子夹板	XB416	10.0*40	120只/箱
医用高分子夹板	XB420	10.0*50	60只/箱
医用高分子夹板	XB430	10.0*75	60只/箱
医用高分子夹板	XB530	12.5*75	40只/箱
医用高分子夹板	XB536	12.5*90	40只/箱
医用高分子夹板	XB546	12.5*115	24只/箱
医用高分子夹板	XB630	15.0*75	40只/箱
医用高分子夹板	XB636	15.0*90	24只/箱
医用高分子夹板	XB646	15.0*115	24只/箱