

西臣邦尼医用高分子软绷带

产品名称	西臣邦尼医用高分子软绷带
公司名称	江苏西臣邦尼医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西臣邦尼 型号:XD1、XD2、XD3、XD4、XD5、XD6
公司地址	建湖县民营科技创业园4号路88号
联系电话	025-86221732 18851711471

产品详情

【产品名称】医用高分子软绷带

【产品型号】XD1、XD2、XD3、XD4、XD5、XD6

【产品规格】见标准

【产品标准号】YZB/苏（盐）0008-2014

【注册证号】苏（盐）食药监械（准）字2014第1640008号

【生产许可登记号】苏盐食药监械登字2010005号（更）

【性能与结构】本产品由纤维布和聚氨酯树脂混合制成。

【适用范围】用于骨科矫形、骨折外固定、软组织撕裂伤及骨折愈合后功能锻炼时保护性外固定。

【使用方法】

- 1、将部位固定，棉垫衬里；
- 2、绷带开封后，浸入常温20 ~25 水中约4~8秒钟；
- 3、用力甩出余水，必须使用一卷拆开一卷，防止提前拆开硬化；
- 4、螺旋缠绕，1/3或1/2重叠6-9层；
- 5、拉紧缠绕，增强层间粘合力，但缠绕不可过紧，以免影响血液循环，8~15分钟开始固化；

6、包扎后在绷带外面揸揉层与层充分粘接；

7、绷带包扎后受潮可用电吹风吹干；

8、拆除时可用手术刀、电锯。

【注意事项】

1、常温、避光保存；

2、被缠绕的部位有感染或高度肿胀的情况下，建议使用绷带托或待肿胀消退后，再打管形。

【警 示】如有产品漏气或硬化后请勿使用。

【生产企业】江苏西臣奥勒医疗科技有限公司

【地 址】江苏省建湖县民营科技园建宝北路108号