

给药器妇科吸附填塞

产品名称	给药器妇科吸附填塞
公司名称	四川九尔药业有限公司
价格	69.60/盒
规格参数	品牌:九尔 成份:活性炭纤维
公司地址	成都高新区天府大道中段1388号1栋2层213号
联系电话	18653722727

产品详情

产品名称：

九尔阴道填塞（给药器）

适用范围：

阴道填塞适用于阴道给药用。

产品特点：

本产品不含任何化学成分，无毒副作用、无刺激、无致敏性，利用光滑导管将芯体送到病变部位，吸附病菌后再取出体外，是在医学临床上非常安全、科学的给药方式，突出解决了早孕期或孕期妇女阴道炎慎用药的难题。

经过特殊处理的医用活性炭纤维具有选择性吸附作用，对大量位于上皮组织糖原部分，具有维持人体健康及免疫力作用的乳酸杆菌不产生吸附作用，因此，既保持了阴道内正常环境，又不会破坏乳酸杆菌的生长。

高效吸附病菌，解决妊娠期妇女安全给药难题

作用机理：

阴道填塞（给药器）利用生物材料医用高活性炭纤维的高吸附性、强引流性的特点，吸附阴道内的致病菌、病毒并排出体外，使其回复正常的生理自洁功能。

医用高活性炭纤维其本身内部孔隙结构发达，具有大量肉眼看不见的微孔，1g活性炭材料的微孔，

将其展开后表面积可达800-15000平方米，尤其是经过特殊处理之后，这些高度发达的孔隙结构，使活性炭能吸附超过自身20倍以上的物质，从而可以有效的吸附、清除阴道内的致病菌，达到抑菌止痒、清除异味、调节阴道内环境，回复正常的生理状态；并促使手术后的细胞生长、组织再生。

使用说明：

阴道放置。白天或睡前均可使用，放置时间5-9小时，每1支：症状严重者每日2支：8天一个疗程。

使用步骤：

1：清洁双手，打开阴道填塞包装，用拇指和中指捏住外导管拉绳反对着身体，先深呼吸，然后轻轻地把外导管推进阴道，如果导管推进去不太容易，可以再推进的同时轻轻旋转导管。

2：当你的手接触到身体时，捏住外导管，用食指将内导管完全推入内导管，使管芯离开导管进入阴道底部。

3：管芯已经推入阴道底部，轻轻地取出内外两支导管弃置，部分拉绳留在体外，更换时捏住拉绳轻轻拉出。上厕所时不要取出。

储存条件、方法：

密封，置阴凉处。

产品性能结构：

由管腔、推杆、芯体组成。

注意事项：

- 1、阴道填塞为一次性使用，请勿重复使用。
- 2、有习惯性流产史的孕妇慎用。
- 3、月经期停用。