

欧耀天轨输液架

产品名称	欧耀天轨输液架
公司名称	重庆洋欧耀新型建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧耀 产地:重庆 材质:不锈钢 铝合金
公司地址	南岸区南坪西路73号
联系电话	17823794087

产品详情

天轨输液架组成

吊杆：不锈钢双杆伸缩

连体：钢镀铬

吊钩：铝合金、钢镀铬、

升降调节：无级手动随意调节

防尘：防尘罩

产品材质和规格

不锈钢内管

不锈钢外管

内管升降高度为0.5m左右

合到一起距地面高度为2m左右

吊架外管长度根据房高订做

滑车

可在轨道上任意移动，当吊杆承重时,滑车会固定吊杆的位置；

滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；

滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨；

滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动。

轨道

轨道：铝合金材质，白色亚光色泽，有I型、U型、O型、L型、

长度按照客户要求订做

产品特点

输液瓶高度调节轻松、灵活、方便、省力、舒适；

一体化防护罩设计，方便清洁，外形更为美观；

专用防落尘装置，无菌洁净手术室、ICU专用防落尘吊架；

吊架多样化设计，可适合不同风格与档次的病房；

吊架可装吊钩与吊筐共用，适用不同输液形式；

吊架下拉扶手符合人体力学要求；

吊杆有多种材料、颜色可供选择，以配合病房整体装修风格

安装指南

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。
- 3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。
- 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

注意事项

- 1、本品为输液专用器械，使用时切忌用力猛拉、吊挂其它物品或儿童将其当秋千晃动；2、每年应定时检查天轨输液架的安装牢固性、可靠性；
- 3、本产品使用环境应为相对湿度不大于90%，温度在-40 ~ 50 ，无腐蚀性气体环境中。
- 4、应定时清洁吊杆、吊勾、滑车，确保其随时处于清洁卫生状态。