## 加粗加厚不锈钢天轨输液架 伸缩输液吊杆

产品名称	加粗加厚不锈钢天轨输液架 伸缩输液吊杆
公司名称	重庆洋欧耀新型建材有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:欧耀 产地:重庆 材质:不锈钢
公司地址	南岸区南坪西路73号
联系电话	17823794087

## 产品详情

加粗加厚不锈钢天轨输液架 伸缩输液吊杆

天轨输液吊杆是为了减轻医护人员劳动强度而设计、制造的性能优良,是输液换代产品。它主要用于医院的病房、监护室、抢救室、手术室等。

## 安装指南:

- 1、首先确定输液天轨的安装位置,一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯和风扇,手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距,用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔,打
- 入 8塑料膨胀(注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐)。
- 3、将滑车装入轨道内,用M4×10自攻螺钉将塑料封 头安装轨道两端(O型轨无堵头,其接头处应平整对 齐,保证滑车能在轨道内自由滑动)。然后用M4× 30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。

4、安装完毕后,将吊杆挂在吊车挂钩上,检查其运转及其他性能。

## 使用说明:

使用时,请将吊架挂在滑车钩内,轻轻举动吊架,带着滑车到预定位置后释放,此时滑车自锁于该处,将药瓶挂在挂勾上。

如需调节挂勾高度,请用手握住吊杆最下端两个不锈钢装饰球,稍用力使两球的距离靠拢,同时上下移动滑到预定位置后放开按钮,吊杆便自动锁定并固定在这一高度。

用毕后,可将吊杆拿下存放。