

加粗加厚不锈钢天轨输液架 伸缩输液吊杆

产品名称	加粗加厚不锈钢天轨输液架 伸缩输液吊杆
公司名称	重庆洋欧耀新型建材有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:欧耀 产地:重庆 材质:不锈钢
公司地址	南岸区南坪西路73号
联系电话	17823794087

产品详情

加粗加厚不锈钢天轨输液架 伸缩输液吊杆

天轨输液吊杆是为了减轻医护人员劳动强度而设计、制造的性能优良，是输液换代产品。它主要用于医院的病房、监护室、抢救室、手术室等。

安装指南：

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯和风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8 冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。
- 3、将滑车装入轨道内，用M4 × 10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4 × 30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。

4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

使用说明：

使用时，请将吊架挂在滑车钩内，轻轻举动吊架，带着滑车到预定位置后释放，此时滑车自锁于该处，将药瓶挂在挂勾上。

如需调节挂勾高度，请用手握住吊杆最下端两个不锈钢装饰球，稍用力使两球的距离靠拢，同时上下移动滑到预定位置后放开按钮，吊杆便自动锁定并固定在这一高度。

用毕后，可将吊杆拿下存放。