

U型输液轨道AU型输液轨道A医疗输液轨道批发

产品名称	U型输液轨道AU型输液轨道A医疗输液轨道批发
公司名称	景县万康医疗器械销售有限公司
价格	27.00/套
规格参数	景县万康:003 30*20*1.2:01 景县:02
公司地址	河北省衡水市景县降河流镇花牛王村
联系电话	18231859071

产品详情

轨道：铝合金材质，白色亚光色泽，有I型、U型、O型、L型、
规格：U、O、L32mm*28mm*1.2mm/1.3mm 型32mm*28mm*1.0mm
长度按照客户要求订做

适用范围： 安装于医院、养老院、福利院等的医疗设施。

产品特点：

- 1、天轨输液轨道有O型、L型、U型、直型，也可特制各种异型轨道。
- 2、在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。
- 3、我们的安装不采用射钉枪等临时敷衍方式，而塑料胀塞加木螺丝。
- 4、市场上的塑料胀塞太杂，安全性没有保障。我们自己开模具，制作加厚、材质优良、韧性好的塑料胀塞。100%保证了使用安全。

滑车 可在轨道上任意移动，当吊杆承重时,滑车会固定吊杆的位置；
滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；
滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨；
滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动。

安装方法：

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。
- 3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头螺钉 将轨道安装在天花板上。
- 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

