

半自动猪精液袋装机 / 精液灌装

产品名称	半自动猪精液袋装机 / 精液灌装
公司名称	北京田园奥瑞生物科技有限公司
价格	49000.00/套
规格参数	品牌:田园奥瑞 型号:台 产地:北京
公司地址	北京市房山区弘安路87号院3号楼4层401室（注册地址）
联系电话	010-80749416 17181182532

产品详情

半自动猪精液袋装灌装机应用于畜牧场、兽医站、种猪场、公猪站、育种中心、良种中心等养殖中心的猪人工授精工程升级配套。半自动猪精液袋装灌装机应用于畜牧场、兽医站、种猪场、公猪站、育种中心、良种中心等养殖中心的猪人工授精工程升级配套。技术参数：电压：220V智能控制，灌装量60ml、80ml；自动控温，封口严实；尺寸：60*30*50cm功能：手摇上袋，手动封口，自动灌装；产品特点：一人操作简单快捷，提高工作效率；不锈钢材质，美观易清洁，防腐蚀经久耐用；输送、定量、灌装、封口、分切、省时省力；进口蠕动泵、匀速运行、质量过硬、使用寿命长；便于袋子走位，使操作更加简单；安装配件操作：1、将电源线插在左侧链接孔，接通电源；2、调节温度，通过温度控制器上的加减按键调节温度（建议：夏季130度，春秋140度，冬季150度）；3、通过手动调节按钮，将灌针安装好；4、橡胶管连接灌装针，然后打开蠕动泵，将橡胶管放置中间，并盖好蠕动泵；另一端接上橡胶管沉头，放入准备盛放精液的容器；5、将精液袋托盘放于机身右侧，相应位置；6、将精液袋红头朝下放于精液袋托盘；操作流程：1、插上电源，将右侧温控仪中的数字调整为150度；2、将左侧第一个袋子的定位孔放入定位柱，旋转方向盘，使第一个袋子的中央对准灌装针；3、当温度显示到达150度时，将软管的一头安装在灌装针上，另一头带沉头的放入灌装液中，并将中间部分压入蠕动泵的凹槽中；4、第一次灌装时，找一个小量杯放在灌装针的下方，按压手柄一次使液体流入量杯中，将液体放回大量杯，并将灌装针头放入袋子中；5、左手旋转方向盘，每次进一个袋子，右手按压手柄完成封口及灌装；注意：温度达到150度左右时，封口；蠕动泵停止转动后，松开手柄；如继续按压3秒以上，将会进行下次80ml灌装；6、右侧将带子沿线分开，可一次一个或者一次几个。注意事项：1、工作温度为150度左右，以免烫伤；2、工作结束后，切断电源；3、平常不工作的时候，蠕动泵向上打开，不能长时间压住精液传输管。