

精子冷冻细管灌装封口一体机

产品名称	精子冷冻细管灌装封口一体机
公司名称	北京田园奥瑞生物科技有限公司
价格	300000.00/套
规格参数	品牌:田园奥瑞 型号:套装 产地:北京
公司地址	北京市房山区弘安路87号院3号楼4层401室（注册地址）
联系电话	010-80749416 17181182532

产品详情

全自动冻精细管灌装封口一体机

动物人工授精：马、牛、羊、犬、狐狸、熊猫、珍稀动物、国家一级保护动物等育种保种，冻精生产制作；冻精细管灌装分装机器，工作效率高、噪音小、操作容易、维护方便。

工作原理：

细管灌装时，真空泵、吸力调节瓶和长、短灌装针头同时配合工作。真空泵产生吸力，灌装时精液通过末端棉塞的1/3时为宜。细管通过灌装漏斗,一次下1支细管,进行灌装精液,灌装完毕后通过封口机进行封口,细管封口采用超声波封口的原理，以超音波超高频率的振动在适度压力下，使细管的接合面产生磨擦生热而瞬间熔融接合，完成封口。

产品特点：

- 1、集灌装、封口一体式设计，制作精良，操作更加简便。
- 2、灌装速度，每小时可灌装2500支细管。
- 3、一体化设计，占用空间小，噪音低；操作简单；模块化设计，维护方便。

主要组成部分：

1、 细管灌装机主机

2、 超声波主机

规格：

尺寸	465X340X300mm
细管	0.25ml 0.5ml
电压	220V 50~60Hz
功率	1000W / 6VA
工作效率	1500支细管/小时
材质	不锈钢、铝、塑料
贮存条件：	温度：+4 ~ +20 ；

湿度<80%
质保：1年

TY01细管灌封机操作说明：

- 1、 接通灌封机及超声波主机的电源线；
- 2、 检查并保持灌封机灌装针头和吸气头分开状态，将吸气开关置于“ ON ”的位置；
- 3、 打开灌封机和超声波电源开关；
- 4、 将灌装吸管放入精液中，传输软管卡入电磁阀；
- 5、 将符合标准未使用的0.25ml/0.5ml通用冻精细管放入细管漏斗池内；
- 6、 以上准备就绪后，按下灌封机启停开关，灌封机将自行灌装作业；
- 7、 待灌装完毕后，按下灌封机启停开关结束灌装；

注意事项：

- 1、 细管放入细管漏斗池时，要码放整齐，防止卡住机器；
- 2、 更换输液针和吸头针是，必须保持机器针架打开状态，并拧紧固定针的螺丝；
- 3、 暂停工作时，保持针架打开状态。