

康复理疗科理疗电极片配合中医定向透药仪使用

产品名称	康复理疗科理疗电极片配合中医定向透药仪使用
公司名称	江西晋瑞医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省吉安市青原区河东经济开发区电子工业城1号标准厂房
联系电话	0796-8126677 13766227441

产品详情

康复理疗科理疗电极片配合中医定向透药仪使用

理疗电极片主要结构：本产品由无纺布垫片、导入层（含甘油、酒精和薄荷素油）构成。

理疗电极片使用方法：1、外用，使用前洗净患处擦干。2、撕开铝箔袋，将理疗用电级片分别镶嵌在正负电极板上；理疗用电级片紧贴在皮肤相关部位，用绷带（或敷贴，沙袋等）将电极板固定，压紧。3、理疗结束，切断电源后，松开电极板，取出理疗用电级片，用清水或生理盐水清洗与理疗电极片接触的皮肤相关部位。理疗电极片注意事项：1、理疗用电级片必须与皮肤完全紧密接触2、使用前先清洁皮肤，使用时有清凉感，此时必须注意理疗仪器的输出强度，微感有电刺激即可3、使用时如感到刺激太强，如皮肤出现强烈刺痛或灼热感，必须减小理疗仪器的强度或温度4、理疗用电级片包装破损，电极片变干时，不宜使用，以免造成灼伤5、本品为一次性使用产品，不能重复使用，以免造成因为电级片电阻等理化性质改变，造成灼伤或交叉感染6、本产品配合理疗仪器使用，使用时间不能超过一小时7、皮肤破损或局部疮疡处禁用

包装：铝箔袋密封包装执行标准：YZB/赣吉0081-2013生产规格：9cm*6cm*2/型储藏：置阴凉干燥处有效期：两年