

甘露醇恒温加热箱

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 甘露醇恒温加热箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 48600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

甘露醇恒温加热箱产品用途--

临床上溶解结晶的甘露醇,常规方法是将瓶装甘露醇置于电饭煲中,将甘露醇完全浸没于水中加热煮沸,此种方法存在两个弊端,一是加热时间较长,二是加热后甘露醇瓶身标签易脱落、浸烂,影响用药安全。福意联甘露醇恒温箱,37~42度的环境里进行溶解结晶,或25~27度的环境下保温防止结晶,方便解决甘露醇结晶溶解问题,提升护理工作者的工作效率,已经在国内各大医院广泛使用。

甘露醇恒温加热箱销售热线:[福意联]-李国轩-138 1123 7849 (微信同号)

甘露醇恒温加热箱公司说明:

北京福意电器有限公司依靠稳打实干抓住市场,利用专业营销拓展市场,凭借服务巩固市场,立誓创造产品,提供服务,在激烈的市场竞争中站稳脚跟,谋求发展。诚信、进取、严谨的务实风格使得公司在行业内外树立了坚实的形象、取得了良好的口碑。回首过去,本公司坚持“诚信至上、以人为本、永续经营”的理念,树立了良好的品牌形象与经营典范。展望未来,公司将通过科学的管理和不懈的努力,继续开拓进取,为打造、实用的实验室设备而不懈努力,以更加炽热的真诚与客户携手合作,共创辉煌。

甘露醇恒温加热箱型号:产品型号 容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

-----型号:FYL-YS-828L 828L

温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48

外型尺寸:1267*680*2105mm -----型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595*675*1795mm-----

甘露醇恒温加热箱参数：

【产品型号】FYL-YS-150L 【容 积】150L 【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×865mm【商品重量】47kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(36g)【额定输入功率】100W1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

甘露醇恒温加热箱使用方法:

加热溶解前确认结晶甘露醇，瓶体无裂缝，药液在有效期内，然后根据甘露醇加热柜体积大小放入相适应数量的甘露醇竖放于托盘上，启动甘露醇加热柜，调节温度加热后，体积小的结晶可基本溶解，体积大的结晶明显缩小，如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的，在放入甘露醇加热柜内高温存放数小时后，结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后立即使用，也可在调至25度以上，防止甘露醇再次结晶。

甘露醇恒温加热箱售后：

本着创造，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

修期内或保修期外如冷柜出现故障，我司在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。