

溶解甘露醇加热箱

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 溶解甘露醇加热箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 48600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

溶解甘露醇加热箱产品用途--

甘露醇是一种己六醇,是山梨糖醇的异构化体,是良好的利尿及脱水药。20℃时,甘露醇在水中溶解度为1:5.5(18%),20%甘露醇注射液是过饱和溶液,当室温低于15℃时极易产生甘露醇微粒,甚至析出结晶。福意联甘露醇注射液恒温保存柜,可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解,或25~27度的环境下保温,防止结晶现象的发生。

溶解甘露醇加热箱销售热线:[福意联]-李国轩-138 1123 7849(微信同号)

溶解甘露醇加热箱公司说明:

北京福意电器有限公司以研发、供应、销售为一体,公司专业供应医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20℃冰箱、车载冷藏箱等系列产品,数百个品种的产品得到了广大用户的一致好评。北京福意电器有限公司拥有雄厚的技术力量,齐全的检验设备,从而保证了优良的产品质量。另外专业的售后服务也为本厂赢得了信誉。本着“质量取胜,诚信为本”的服务宗旨,我厂热忱欢迎各方朋友合作!

溶解甘露醇加热箱型号:产品型号 容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

-----型号:FYL-YS-828L 828L

温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48

外型尺寸:1267*680*2105mm -----型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595*675*1795mm-----

溶解甘露醇加热箱参数：

【产品型号】FYL-YS-230L 【容 积】230L 【温度范围】2~48 每度可调【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×590×1215mm【商品重量】47kg

【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(43g)【额定输入电流】0.8A

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

溶解甘露醇加热箱使用方法:

加热溶解前确认结晶甘露醇，瓶体无裂缝，药液在有效期内，然后根据甘露醇加热柜体积大小放入相适应数量的甘露醇竖放于托盘上，启动甘露醇加热柜，调节温度加热后，体积小的结晶可基本溶解，体积大的结晶明显缩小，如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的，在放入甘露醇加热柜内高温存放数小时，结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后立即使用，也可在调至25度以上，防止甘露醇再次结晶。

溶解甘露醇加热箱售后：

以合理的价格、完善的服务，提供的产品

用服务与真诚来换取您的信任与，互惠互利，共创双赢

我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来

坚持顾客至上的原则，所有产品一年内免费保修，并负责终身维护