

# 甘露醇加温溶解箱

产品名称	甘露醇加温溶解箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48600.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 甘露醇加温溶解箱产品用途--

福意联甘露醇注射液溶化及恒温箱，利用蒸气加热原理和可调控温度控制装置，可使结晶在短时间内迅速溶化，且不需要摇动，节省溶化时间。溶化后的甘露醇注射液可保持一定温度与人体温度接近，可随时取用，尤其给重危患者的抢救带来极大方便。同时还可以减少在快速静点时对患者血管造成的损伤，减少静脉炎及输液反应的发生。该装置还可用于膀胱冲洗前的药液加温，以及某些不易溶化药液的加温，经临床试用，解决了护理工作中的一项难题。

甘露醇加温溶解箱销售热线：[福意联]-李国轩-138 1123 7849（微信同号）

### 甘露醇加温溶解箱公司说明:

北京福意电器有限公司是集一家供应，销售，维护为一体的综合性仪器服务商，公司秉承“以德敬人，以诚待人”的一贯宗旨，以优良的品质好，实惠的价格，诚信务实为公司营销理念。经过不懈努力福意联已与全球多家著名仪器仪表厂商建立了稳固、广泛的技术与销售合作关系.已逐渐发展成为国内影响力的仪器供应商。

甘露醇加温溶解箱型号:产品型号 容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm  
-----型号:FYL-YS-828L 828L

温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48

外型尺寸:1267\*680\*2105mm -----型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595\*675\*1795mm-----

甘露醇加温溶解箱参数：

【产品型号】FYL-YS-230L 【容 积】230L 【温度范围】2~48 每度可调【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×590×1215mm【商品重量】47kg

【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(43g)【额定输入电流】0.8A

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

甘露醇加温溶解箱使用方法:

1、首先确认甘露醇恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。

2、确认甘露醇结晶程度，如果甘露醇结晶比较严重，已形成絮状结晶或块状，需要42度以上温度经行溶解，等完全溶解后把温度调为37度恒温保存；如果甘露醇没有结晶现象，只需要37度恒温保存，防止结晶及使用。

3、根据箱体大小放入相应的甘露醇瓶数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保甘露醇瓶完好不破裂现象。

4、使用者应根据甘露醇用量和甘露醇结晶情况来合理安排放入甘露醇的数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

甘露醇加温溶解箱售后：

精工打造 十六年的专业品质 ——福意联品牌1·故障率低：采用国外进口全封闭压缩机，可连续长时间无故障工作，已到达世界水平。2·售后服务：完善的售后服务体系为您保驾护航，时间响应客户并解决问题。3·应用广泛：本产品采用制冷加温系统，可加温可制冷，并达到的恒温效果。4·操作简单：简单傻瓜式的操作设计使用户一目了然，很快的投入使用。

