

环氧乙烷灭菌用自含式生物指示剂

产品名称	环氧乙烷灭菌用自含式生物指示剂
公司名称	南京便诊生物科技有限公司
价格	1600.00/盒
规格参数	
公司地址	南京市江宁区天印大道880号
联系电话	86-02552838289/65016260/65016261/ 13951923346

产品详情

【商品名称】

环氧乙烷灭菌用自含式生物指示剂（EOC-E6）（ATCC-9372）

100支/盒芽孢含量 $1 \times 10^6 \sim 5 \times 10^6$ cfu

【规格编号】

商品编码	产品	包装	供应商
BQHS5030T	3M环氧乙烷用生物指示剂	100支/盒4盒/箱 1264	南京便诊
BQHS5030U	3M环氧乙烷用快速阅读生 物指示剂1294	50支/盒4盒/箱	南京便诊
BQHS5030V	3M环氧乙烷用快速生物测 试包1298	25包/盒2盒/箱	南京便诊
BQHS30803	3M快速阅读器（环氧乙烷 用）290G	1台/箱	南京便诊
BFJS50325	环氧乙烷灭菌用生物指示 剂（EOS—E6）（ATCC9 372）	300片/盒	南京便诊
BFZS50326	环氧乙烷灭菌用自含式生 物指示剂（EOC- E6）（ATCC-9372）	100支/盒	南京便诊
BFJS50330	环氧乙烷灭菌生物指示剂 （EO-SUS悬液）（ATCC -9372）	按要求制配	南京便诊

【产品说明】

1、本品为环氧乙烷灭菌生物指示剂，其枯草杆菌黑色变种芽孢抗力的存活时间大于或等于15分钟，杀灭时间小于或等于60分钟。

2、将指示剂放于标准测试包中，按国家规范，分别将各测试包放于锅内不同位置，灭菌处理完毕，取出生物指示剂，挤破内含的安瓿，与一支对照管一起放于37℃恒温箱，48小时后，阅读结果；灭菌管不变色（呈绿色），表示灭菌通过；灭菌管变色（呈黄色），表示灭菌不通过；同时培养的对照管应为阳性（黄色）。

3、培养后，灭菌管不变色（呈绿色），表示灭菌通过；培养后，灭菌管变色（呈黄色），表示灭菌不通过；（必须及时查出灭菌失败原因）。同时培养的对照管应为阳性（呈黄色），如阴性，可能的原因为：培养条件不符合要求；生物指示剂问题；（应及时查出阴性原因）。

【技术标准】

1. 本品性质：

快速监测结果显示；

结果准确，符合国内国际标准；

自含式设计，免除污染可能；

一次性标准生物测试包，方便使用；

为植入物提供精确的灭菌监测保障；

降低外科感染引起的成本。

2. 本品参照新的国家标准，符合国家要求；

3. 提供多种规格、不同级别要求的产品，方便您的需要；

4. 产品包装，好的物流合作伙伴，让你收货无忧！！

【用途】

用于环氧乙烷灭菌锅的灭菌效果的生物检测。

【注意事项】

1、 每次生物检测培养均应设立阳性对照；

2、 在机器判读结果出来前，请勿取出快速生物指示剂。

3、 阳性指示剂，须环氧乙烷灭菌后丢弃。

【生产公司】

公司名称：南京便诊生物科技有限公司

地 址：南京市江宁区东山街道上元大街808号

联系电话：025-65016260，65016261，52838289，85099525，

13951923346，18951960612

传 真：025-52838289

信 箱：njbianzhen@163.com

网 址：www.njbianzhen.cn www.njbianzhen.com