

国内洗鼻器厂家|飞猫电器

产品名称	国内洗鼻器厂家 飞猫电器
公司名称	深圳市耐菲尔医疗器械科技有限公司
价格	688.00/台
规格参数	品牌:飞猫 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区30栋201
联系电话	18814482489 18814482489

产品详情

深圳洗鼻器厂家-深圳市飞猫电器有限公司

洗鼻器是一种用于清洗鼻腔的工具。

它通常借用一定压力（或气囊式洗鼻器、或用重力如简单瓶罐式、或用机械压力如电动式）

将生理盐水送入鼻孔，流经鼻前庭（露在头部外面的部分）、鼻窦、鼻道绕经鼻咽部，或从一侧鼻孔排出，或从口部排出。

通过以上路径，借助于生理盐水自身的杀菌作用及水流的冲击力，将鼻腔内已聚集的致病及污垢排出，从而使鼻腔恢复正常的生理环境，恢复鼻腔的自我排毒功能，达到保护鼻腔的目的。

洗鼻器型号：FC169

功率参数：100-240VAC 50/60HZ 5W

材料，设计：选用美国进口材料，采用专门针对鼻腔，所设计的德国技术；

配有出水暂停键设计；1350次/分钟脉冲式出水，220ml大容量水箱；

通过第三方PIX4防水等级测试，可以在淋浴的同时使用而不会进水；

电池：锂电池（1400毫安）

适配器插口：DC5V，1A

模式：标准、柔和、按摩

充电时间：4小时

洗鼻器使用方法：

- 1、将适宜温水倒入本品的水箱里，加入适量的洗鼻盐（浓度配比建议为：4.6g洗鼻盐/500ml温水），坚持使用固定浓度配比的盐水洗鼻可减少对鼻腔粘膜的刺激与不适；
- 2、将鼻腔喷头安装在本品的喷水手柄上，并将喷水压力调至*低档；
- 3、弯腰、低头、张嘴，头部向左倾斜45度，用嘴呼吸（冲洗的时候屏住呼吸），将鼻腔喷头堵住右侧鼻孔打开开关开始洗鼻。适应低档水压后逐步将档位调高到自己感觉舒适的水流速度与压力。清洗一段时间后再将头部向右倾斜45度，将喷头堵住左侧鼻孔清洗（每侧各清洗250ml洗鼻盐水为**）；
- 4、洗鼻后，头向前倾斜，深呼吸几次，几分钟内鼻腔内的残余盐水会逐步流出。切记不要强行擤鼻，因为鼻咽管的水可能会进入耳道，即使不慎少量进入耳道和口腔也无妨，盐水不是药物，没有副作用；
- 5、完成洗鼻后将水压调到*大，用温水使机器循环两次，自然晾干后收纳妥善以备下次使用；
- 6、初次使用者建议一天两次，早晚各一次，后期可根据自身鼻腔的舒适程度适当减少。

鼻腔清洗器适用人群：

- 1、鼻腔手术患者，鼻腔围手术期者；
- 2、各类鼻炎、慢性鼻窦炎、鼻息肉患者鼻腔肿瘤放、化疗后处理患者；
- 3、长期从事与粉尘较严重的；
- 4、上呼吸道感染患者，亦可针对各类鼻炎患者；
- 5、鼻涕倒流经常要清喉咙或咳嗽；
- 6、气喘，长期或慢性咳嗽；
- 7、萎缩性鼻炎；
- 8、经常因感冒流鼻涕，或过敏流鼻水而引起鼻塞；
- 9、经常暴露在污染的空气或环境中工作环境人群；
- 10、鼻腔容易干燥的人群。

鼻腔清洗器使用方法：（仅供参考）

- 1.将本品对准出入孔，手握气囊慢慢的增加压力即可；

具体清洗操作请以鼻腔清洗器的说明书为准，冲洗时略低头，同时强调冲洗力度适中，水流太大或太小均不好。冲洗液可以从口或对侧鼻腔流出。5岁以下小孩配合度较差。每天一次或数次，根据病人的症状

及冲洗效率而定，通常2-3次比较容易坚持。

鼻腔清洗器注意事项:

- 1.鼻腔冲洗请参照说明书进行。
- 2.鼻腔冲洗时不要说话或吞口水，不要用鼻子呼吸，不要捏着两侧鼻子擤鼻。
- 3.本器械属个人用品，严禁交叉使用。
- 4、禁忌症:鼻腔大面积创伤者；严重氯化钠代谢障碍和过敏者。