

医院用甘露醇加温箱

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 医院用甘露醇加温箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 49800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

医院用甘露醇加温箱用途-

以前遇到有结晶的甘露醇，就放入热水中，然后取出用力摇，费时费力，甚至加热煮沸，有时遇到难溶解的，需几小时都不能完全溶解，并且经常导致瓶签破损，甚至瓶身破裂。福意联生产的甘露醇加温柜可批量加热瓶装（或袋装）甘露醇注射液，操作简单，使用方便。

——【单位名称：北京福意电器有限公司】——【品牌：福意联】——【销售经理：李国轩】
——【销售热线：13811237849】——【服务QQ：2954024337】——由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言，请尽量电话联系，感谢您的谅解！以下产品介绍可能不够完整，如需了解更产品介绍请来电咨询。

医院用甘露醇加温箱公司说明：

对围手术期患者实施加温冲洗液有利于维持稳定的体温，避免术中浅体温证的发生，保障机体正常生理功能的调节，可以有效的降低手术风险。并且能防止因体温降低而引起的一系列并发症。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

医院用甘露醇加温箱型号：-----产品型号
容积大小 温度范围
外型尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm
-----型号:FYL-YS-828L 828L
温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48
外型尺寸:1267*680*2105mm-----型号:FYL-
YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L
温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
外型尺寸:595*675*1795mm-----

医院用甘露醇加温箱使用方法-

- 1、首先确认甘露醇恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、确认甘露醇结晶程度，如果甘露醇结晶比较严重，已形成絮状结晶或块状，需要42度以上温度经行溶解，等完全溶解后把温度调为37度恒温保存；如果甘露醇没有结晶现象，只需要37度恒温保存，防止结晶及使用。
- 3、根据箱体大小放入相应的甘露醇瓶数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保甘露醇瓶完好不破裂现象。
- 4、使用者应根据甘露醇用量和甘露醇结晶情况来合理安排放入甘露的数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医院用甘露醇加温箱售后：

- 一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。
- 二、质量保证:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合国家质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关国家或行业证书。
- 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。
- 四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题我方将严格按照国家“三包”政策执行。