甘露醇加热器

产品名称	甘露醇加热器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

甘露醇加热器用途-

甘露醇注射液为饱和灭菌溶液,常温下存放一段时间易析出结晶,温度越低存放时间越长,结晶越严重。甘露醇遇冷易结晶,临床用药前需融化结晶,为护理工作带来了诸多不便。对于急诊急救脑血管意外病人,如果因为甘露醇结晶未能及时用药则会更多还原。

——【单位名称:	:北京福意电器有限	!公司】———	【品牌:福意联】] [:	销售经理:	李国轩】
———【销售热	热线:13811237849】	———【服务	QQ: 2954024337	7】——由于工	作繁忙,可	「能会有疏
忽,看不到留言,	,请尽量电话联系,	感谢您的谅解!	以下产品介绍可能	能不够完整,	如需了解更	产品介绍
请来电咨询。						

甘露醇加热器公司说明:

加温速度快,温度稳定。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。医用液体保温护理能够减少手术室患者术中低体温情况的发生,降低手术应激反应及术后感染率,提高患者满意度。

甘露醇加热器型号:	产品型特	목
容积大小 温度范围	, HH—	_
外型尺寸	刑 只 ·EVI_VS_150I	1501
小室八寸		IJUL

温度:2~48 外	>型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
外型尺寸:595*590	D*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
外型尺寸:595*570	D*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
外型尺寸:595*695	5*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm
	型号:FYL-YS-828L 828L
温度:2~48 外	、型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48
外型尺寸:1267*68	30*2105mm型号:FYL-
YS-151L 150L 温	温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L
温度:0~100 夕	仆型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
外型尺寸:595*675	5*1795mm

甘露醇加热器使用方法-

加热溶解前确认结晶甘露醇,瓶体无裂缝,药液在有效期内,然后根据甘露醇加热柜体积大小放入相适应数量的甘露醇竖放于托盘上,启动甘露醇加热柜,调节温度加热后,体积小的结晶可基本溶解,体积大的结晶明显缩小,如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的,在放入甘露醇加热柜内高温存放数小时后,结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后立即使用,也可在调至25度以上,防止甘露醇再次结晶。

甘露醇加热器售后:

公司对所生产的所有产品的质量及售后服务,作以下承诺:1、对本公司的产品,以售出日为准。产品质量保证期限为一年(三包期),核心部件压缩机为三年,终身维护。2、产品在质量保证期内,本公司负责免费维修及更换配件。3、整机产品超出产品质量保证期,出现故障,本公司负责维修及更换配件只收取配件费用。