

# 泰迪动物怀孕检测卡，金毛动物怀孕试纸操作简单易用

产品名称	泰迪动物怀孕检测卡，金毛动物怀孕试纸操作简单易用
公司名称	亚菲斯康(廊坊)生物技术有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:亚菲斯康 型号:6454 产地:廊坊
公司地址	河北省廊坊市经济技术开发区耀华道18号（注册地址）
联系电话	13417491176

## 产品详情

泰迪动物怀孕试纸，泰迪动物怀孕检测卡，金毛动物怀孕试纸，狗狗试纸，狗狗试纸  
测试怀孕，测孕纸狗狗，孕狗测试纸，狗狗验孕

（而升级版怀孕测试卡只需要检测犬大腿血，滴3滴到测试卡等待15分钟可以检测）

有了此专业的怀孕检测卡，犬舍工作人员免去了带怀孕宠物到宠物医院的环节，避免了舟车劳累出现流产的可能，同时大家都知道宠物医院毕竟也是医院，都是狗  
宠物生病了才去医院，想必犬舍的工作人员也不想带着怀孕的爱犬到医院。所以，狗 犬  
猫的怀孕测试卡就特别有必要，您不需要特别专业的知识就可以区分宠物  
狗是否怀孕从而可以进一步护理。

而对于宠物医院，虽然已经有了B超检查设备，但是购买犬 猫怀孕测试卡也是非常有必要，两个产品并不矛盾。由于犬怀孕测试卡价格便宜，医院既可以卖测试卡给宠物主，也可以适当合理收取离心血清的检测费用，这样很好地补充了宠物医院的产品线，为宠物医院增加了收入。

### 【结果判读】

因母畜个体之间的差异性，判读结果如下：

1、建议第一次检测时间在配种后的25天左右，即 $25 \pm 2$ 天。

如在检测区出现两条线，即C/T线均显示红线，判定为已孕。如图所示：

2、如第一次检测时间在 $25 \pm 2$ 天内，检测区出现一条线，即只有C线显示，即无法判断是否受孕，需要在间隔一周以后即满30天以后进行第二次检测。如仍旧显示一条线，即为未孕。如显示两条线，即为已孕。（这里值得强调的是：因为母畜个体之间的差异性，在受孕以后子宫释放激素初期含量略有不同，故部分犬只释放激素较晚，所以需要通过第二次检测判定是否真正受孕）。（而升级版怀孕测试卡只需要检测犬大腿血，滴3滴到测试卡等待15分钟可以检测）

不同怀孕阶段的检测线显色强度随受孕激素浓度的改变而改变。

亚菲斯康(廊坊)生物技术有限公司专业从事犬怀孕测试卡的研发与销售，在小动物，犬牛等行业钻研时间超过8年，具有一流的技术开发能力，资金实力雄厚，并且不断开发出有技术含量的畜牧类试剂产品，服务畜牧市场的客户群体，为客户提供更有价值，更实在用的产品。欢迎批发，10个起批发含运费，量大优惠。

亚菲斯康(廊坊)生物技术有限公司

销售：李维京

电话：13417491176

微信：13417491176

商务QQ: 1475268695

犬怀孕试纸，猫怀孕时间，猫怀孕测试卡，猫专业怀孕检测卡，动物怀孕测试纸，猫怀孕测试，狗怀孕测试，如果判断犬怀孕时间，猫怀孕测试，狗狗试纸，狗狗试纸  
测试怀孕，测孕纸狗狗，孕狗测试纸，狗狗验孕