

# 泰迪宠物怀孕测试卡易用简单，环节不复杂，易操作

产品名称	泰迪宠物怀孕测试卡易用简单，环节不复杂，易操作
公司名称	亚菲斯康(廊坊)生物技术有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:亚菲斯康 型号:645645 产地:廊坊
公司地址	河北省廊坊市经济技术开发区耀华道18号（注册地址）
联系电话	13417491176

## 产品详情

狗狗试纸，狗狗试纸 测试怀孕，测孕纸狗狗，孕狗测试纸，狗狗验孕，犬怀孕试纸，宠物怀孕测试卡，动物怀孕试纸，动物怀孕检测卡，动物怀孕试纸，猫狗怀孕试纸

有了此专业的怀孕检测卡，犬舍工作人员免去了带怀孕宠物到宠物医院的环节，避免了舟车劳累出现流产的可能，同时大家都知道宠物医院毕竟也是医院，都是狗宠物生病了才去医院，想必犬舍的工作人员也不想带着怀孕的爱犬到医院。所以，狗犬猫的怀孕测试卡就特别有必要，您不需要特别专业的知识就可以区分宠物狗是否怀孕从而可以进一步护理。（而升级版怀孕测试卡只需要检测犬大腿血，滴3滴到测试卡等待15分钟可以检测）

### 【使用说明】

- 一、抽取犬、猫静脉血1-2ml。
- 二、离心4000转15分钟，提取血清。
- 三、用滴管吸取2滴血清（根据我们提供的视频添加2滴的量，约为100ul），滴加到检测卡加样孔处。
- 四、等待15分钟，进行结果判读。

### 【结果判读】

因母畜个体之间的差异性，判读结果如下：

1、建议第一次检测时间在配种后的25天左右，即 $25 \pm 2$ 天。

如在检测区出现两条线，即C/T线均显示红线，判定为已孕。如图所示：

2、如第一次检测时间在 $25 \pm 2$ 天内，检测区出现一条线，即只有C线显示，即无法判断是否受孕，需要在间隔一周以后即满30天以后进行第二次检测。如仍旧显示一条线，即为未孕。如显示两条线，即为已孕。（这里值得强调的是：因为母畜个体之间的差异性，在受孕以后子宫释放激素初期含量略有不同，故部分犬只释放激素较晚，所以需要通过第二次检测判定是否真正受孕）。

不同怀孕阶段的检测线显色强度随受孕激素浓度的改变而改变。

（而升级版怀孕测试卡只需要检测犬大腿血，滴3滴到测试卡等待15分钟可以检测）

亚菲斯康(廊坊)生物技术有限公司

销售：李维京

电话：13417491176

微信：13417491176

商务QQ: 1475268695

动物怀孕测试纸，猫怀孕测试，狗怀孕测试，如果判断犬怀孕时间，猫怀孕测试，狗怀孕检测卡，狗怀孕测试卡怎么用，宠物怀孕测试卡，宠物怀孕检测卡，猫怀孕时间，犬怀孕测试卡，狗怀孕检测试纸，动物测孕卡，犬测孕纸，狗狗验孕，狗狗试纸，狗狗试纸  
测试怀孕，测孕纸狗狗，孕狗测试纸，狗狗验孕