

美国原装进口DMS深层肌肉刺激仪

产品名称	美国原装进口DMS深层肌肉刺激仪
公司名称	山东沐恒医疗科技有限公司
价格	11.00/1
规格参数	
公司地址	高密市人民大街1777号
联系电话	15689810326

产品详情

产品简介及参数

在竞技体育和全民健身高速发展的今天，健康和体质已经是生活的重中之重。从专业运动员到普通人群，都会出现各种各样的肌肉疼痛，中期绝大部分疼痛都是由于肌肉疾病导致的，比如：机点、肌肉粘连、拉伤、乳酸堆积、瘢痕组织等等。美国DMS电动肌肉深层刺激仪彻底打破推拿、等传统治疗方法，电动深层肌肉刺激仪通过击打与机械振动作用于深层肌肉组织，刺激其本体感觉功能，市面上任何仪器都不能与美国DMS 电动深层肌肉刺激仪的有效性相媲美。

美国DMS电动深层肌肉刺激仪的技术参数

- 振动头敲击频率：60HZ
- 振动仪尺寸：25.4cm x 5.08 cm x 13.97cm
- 振动头伸缩距离：6mm
- 手柄直径：5.08cm
- 振动仪重量：2.5kg
- 击打头材质：钛合金

美国DMS电动深层肌肉刺激仪的有效作用

- 用于训练后全身肌肉或局部肌肉紧张痉挛的治疗与放松，有效缓解训练后乳酸堆积，预防损伤，提高运动表现。
- 用于扭伤、拉伤等软组织损伤康复。

- 对于促进血液循环淋巴回流具有显著的作用。
- 对于肌肉慢性疼痛都有着极为显著的疗效。
- 通过对肌肉与筋膜产生轻微的牵拉作用，可以有效的保持其弹性。
- 有效治疗长度变短的肌肉，刺激较弱以及萎缩肌肉，有效促进肌肉力量平衡，恢复正确体姿，帮助实现更大的运动范围。

电动深层肌肉刺激仪禁忌症

- 不要在以下部件或周围使用DMS：眼睛、牙齿、隆胸、癌细胞、生殖器官、电子设备或假肢、螺丝钉等金属物。
- 对于糖尿病患者，美国DMS电动深层肌肉刺激仪只能在脚底和手部使用。
- 不要将DMS放在任何可能骨折处使用。
- 如果疼痛是持续性的，请立即停止使用并向医生咨询。
- 不要对16岁以下人群使用美国DMS电动深层肌肉刺激仪，因为生长连结面（骨骺）处血管丰富。
- 不要对孕妇使用DMS。
- 不要在水中或湿润环境中使用DMS。

DMS电动深层肌肉刺激仪使用说明

- 在运动前后使用美国DMS电动深层肌肉刺激仪可以缓解肌肉疼痛和软组织损伤。
- 使用过程中，患者不需要拖去任何衣物，但是要摘除腰带、钱包、首饰、鞋子等附属品。治疗时需垫一块柔软的折叠好的干毛巾。
- 使用电动深层肌肉刺激仪时应该避免在脊柱区域以及突出的骨性结构附件使用DMS。
- 电动深层肌肉刺激仪可以在任何独立肌肉或任何肌群使用。任何肌肉或软组织的修复没有规定的时间。永远以较小的压力开始并逐渐增加压力大小。

- 使用电动深层肌肉刺激仪治疗应该注意强调患者一天水摄入量的增加。