

供应坐式分娩台架悬吊式分娩座椅组合使用说明

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 供应坐式分娩台架悬吊式分娩座椅组合使用说明 |
| 公司名称 | 山东三汇医疗科技有限公司 |
| 价格 | .20/1 |
| 规格参数 | 品牌:三汇 型号:通款 所在地:临沂兰山 |
| 公司地址 | 山东省临沂市兰山区奥斯卡CBD中心大厦 |
| 联系电话 | 15563371780 |

产品详情

供应坐式分娩台架悬吊式分娩座椅组合使用说明

坐式分娩台架/悬吊式分娩座椅组合 使用说明：将悬吊钢板底盘放置在平整牢固的地面上，调整好角度。2.将移动弯管推至底盘圆管口对准，将弯底部吞入底盘立柱口内，调正姿态。3.双手扶把柄，对齐钢板底部。4.将圆钢立柱周边的内六角螺丝上紧，直到完全固定为止。5.在白色钢板底座周围铺粉红圆形地垫，并调好角度。6.将白色地垫放置在粉红垫中间，完全与底部的钢板吻合。7.将白色弧形垫放置在立柱后面，扣紧底盘圆管，调整牢固。8.将老公陪护椅底部双管对准悬吊下面的双弯管，插入双管内，调整方位。9.调整陪护椅后，用内六角扳手拧紧两边的螺丝。10.将导乐分娩凳底部半圆弧放置在白色地垫圆圈弧侧，上面半圆弧背部靠陪护椅前侧。11.在分娩凳前放置导乐师接生凳，半圆弧与分娩凳半圆弧相对应。12.安装完毕，在悬吊环内挂粉红色丝带，调整长度打折扣，下垂于地垫。13.安装完毕，展示整体组合效果图。注明：在老公陪护椅下自封袋内放置备用“安装工具”，以备安装使用。悬挂式分娩组合座椅由山东三汇医疗科技有限公司生产，是一家专门从事生产销售导乐工具的厂家，生产的产品包括导乐球 导乐球架 导乐车 导乐分娩凳 导乐枕 导乐垫 导乐大便椅 产钳 各种教学模型 悬吊式分娩组合座椅 悬吊式坐式分娩凳等。