

深层肌肉放松仪

产品名称	深层肌肉放松仪
公司名称	山东沐恒医疗科技有限公司
价格	9.00/台
规格参数	
公司地址	高密市人民大街1777号
联系电话	15689810326

产品详情

深层肌肉放松仪

DMS治病的两原理

1、DMS产生快速连续的振动和打击，对于患者就像是强烈振动。和手法治疗一样，DMS会影响机械感受器的刺激，从而抑制了疼痛，放松痉挛肌肉，控制脊柱关节恢复正常活动。

DMS既可以独立治疗，也可以结合任何其他的关节松动术、关节活动度手法技术使用。在神经-肌筋膜技术，手法前后使用，效果好。王主任还将DMS和神经松动术结合使用，DMS引发肌肉机械收缩，疗效中显示对神经肌肉骨骼症状有效果。

2、DMS直接影响的组织是皮肤，筋膜，肌肉系统，淋巴系统以及神经系统，间接影响的组织是腺组织，消化和骨骼系统。在麻木或刺痛的情况下，DMS产生的振动会产生使其麻木的功效，反馈是表现出镇静。和按压技术一样，DMS可以减少肌肉，肌腱，骨膜，韧带以及皮肤上的扳机点敏感度。DMS可以通过皮肤上感觉神经的反射作用来产生镇静效果。

深层肌肉放松仪-

深层肌肉刺激仪使用说明：

- 在运动前后使用深层肌肉刺激仪可以缓解肌肉疼痛和软组织损伤。
- 使用过程中，患者不需要拖去任何衣物，但是要摘除腰带、钱包、首饰、鞋子等附属品。治疗时需垫

一块柔软的折叠好的干毛巾。

- 使用深层肌肉刺激仪时应该避免在脊柱区域以及突出的骨性结构附件使用。
- 电动深层肌肉刺激仪可以在任何独立肌肉或任何肌群使用。任何肌肉或软组织的修复没有规定的时间。永远以较小的压力开

始并逐渐增加压力大小。

- 使用深层肌肉刺激仪治疗应该注意强调患者一水摄入量的增加。