

马用B超发情测孕仪，便携式驴用B超

产品名称	马用B超发情测孕仪，便携式驴用B超
公司名称	河南优力牧农业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区经七路21号4002室（注册地址）
联系电话	15981891957

产品详情

随着马上进入三伏天驴马也都开始进入发情育种繁殖的关键阶段，怎样提高驴马育种繁殖成功的速度是很多驴场马场迫切需要解决的问题，甘道夫动物B超厂家为了解决这个问题历经多年的潜心研究终于系统的开发驴场专用驴用B超，马场专用马用B超测孕仪，使用驴马用B超可以在驴马发情早期快速诊断出是否发情，发情卵泡大小，结构大小，质地，判断卵泡是否成熟，选择理想的配种时间为驴马进行培训，极大的提升了驴马发情一次配种成功的概率，同时对已经配种的驴马可以实时进行超声检查，判断是否配种成功以及胚胎发育是否完善等相关生命体征，为妊娠期间的驴马保驾护航，保证驴马的生理身体健康。那么驴马B超测孕仪价格大概多少钱呢驴马用B超机，驴马用B超测孕使用方法图像判断，驴用B超使用方法测孕判断，马用B超使用方法图像判断，马用B超品牌厂家，驴用B超品牌厂家，驴用B超价格多少钱，马用B超哪家便宜多少钱快来咨询甘道夫驴马B超品牌厂家秦经理 电话微信同号 张经理电话微信同号 网站 甘道夫驴用B超机使用方法:1. 使用驴用B超为母驴测孕前需要先保定：母驴一般不需要保定，只要其保持安静即可，有条件的话在限位栏中对母驴进行检测更方便，姿势侧卧，安静站立，趴卧，或采食均可。如图所示; 驴马用B超机，驴马用B超测孕使用方法图像判断2. 驴用B超探查部位的选择：毛驴体外探查一般在下腹部左右，后肋部前的乳房上部，从***一对乳腺的后上方开始，随妊娠增进，探查部位逐渐前移，***可达肋骨后端。驴被毛***，探查时不必剪毛，但需要保持探查部位的清洁，以免影响B超图像的清晰度，体表探查时，探头与驴皮肤接触处必须涂满藕合剂。如是直肠检查则无需藕合剂。3. 驴用B超探查方法：使用驴用B超体外探查时探头紧贴腹壁，妊娠早期检查，探头朝向耻骨前缘，骨盆腔入口方向，或成45度角斜向对侧上方，探头贴紧皮肤，进行前后和上下的定点扇形扫查，动作要慢。妊娠早期胚胎很小，要细心慢扫才能探到，切勿在皮肤上滑动探头，快速扫描。（探查的手法可根据实际情况灵活运用，已能探查到子宫里面情况为准，当驴膀胱充尿胀大，挡住子宫，造成无法扫到子宫或只能探查到部分子宫时应等驴只排完尿以后再进行探测。使用驴马B超检测发情卵泡超声图像如图所示：使用甘道夫驴用B超检测驴马妊娠诊断成功的超声图像如图所示：技术参数: 产品型号： GDF-W6 屏幕尺寸： 7.0寸触摸屏 探头类型： 6.5MHz变频电子直肠探头 扫描方式：电子线阵 频率调节： 3档 成像模式： B、B/B、4B、B/M、M 伪彩成像： 支持 阵元数：128 视频回放： 360-540 帧 图像存储： 图像存储 (JPG、BMP) 1000帧以上，支持SD卡扩充容量 接口：电源输入接口，DVI接口，1个以上USB接口（可转接USB hub） 测量：内置牛、马、猪、羊、骆驼等多个测量包及多种体位图标扫描深度：zui大显示深度190mm 焦点调节： 焦点数、焦点位置 体 标: 8种 图像处理: 灰度校正、图像平滑、直方图 帧相关调节: 支持 扫描角度: 可视可调 电池：4小时超长电量 应用：胎儿性别；卵巢/卵泡、早孕、怀孕后期等检查；回放：>512帧 主机尺寸：260x154x42mm 净

重：1.2公斤（2.6磅）标准配置：主机（含一块锂离子电池）
6.5MHZ变频电子线阵探头 使用说明书 电源适配器
背带