

# 介入手术室恒温箱

产品名称	介入手术室恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	484894.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

介入手术室恒温箱产品说明:该产品对输入液体，对术中、术后低体温症的预防起到关键作用，减低手术风险。专业用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。用于液体药品，医用盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

介入手术室恒温箱用途:

1. 手术对伤口和创面进行冲洗的液体加温
2. 手术室对甘露醇的加温
3. 对于医用盐水的加温和保温
4. 对手术器械的保温
5. 对透析液的加温和保温
6. 普外科，妇产科，心胸外科，泌尿外科术中清洗

介入手术室恒温箱使用说明:

- 1、首先确认液体恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、确认液体结晶程度，如果液体结晶比较严重，已形成絮状结晶或块状，需要42度以上温度经行溶解，等完全溶解后把温度调为37度恒温保存；如果液体没有结晶现象，只需要37度恒温保存，防止结晶及使用。

3、根据箱体大小放入相应的液体瓶数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体瓶完好不破裂现象。

4、使用者应根据液体用量和液体结晶情况来合理安排放入甘露的数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

介入手术室恒温箱参数：

-----  
产品型号      容积大小    温度范围      外型尺寸

-----  
型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48      外型尺寸:595\*570\*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48      外型尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48      外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48      外型尺寸:595\*695\*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48      外型尺寸:595\*680\*1805mm

-----  
型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48      外型尺寸:1267\*680\*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48      外型尺寸:1267\*680\*2105mm

-----  
型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100      外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100      外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100      外型尺寸:595\*675\*1795mm

介入手术室恒温箱特点:

1. 微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在2-48℃，波动范围小。

2. 高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10℃~35℃环境温度状况

下，仍能够保持箱体内部温度稳定控温精度高达±0.5℃。

3. 无噪音设计：采用环保压缩机制冷技术。
4. 采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。
5. 合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提高降温速度。
6. 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
7. 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区；
8. 自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。
- 9 箱体内胆采用进口高级医用PP，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
- 10 ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。