

闰凯 无创咳痰机

产品名称	闰凯 无创咳痰机
公司名称	济南闰凯医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	闰凯:济南闰凯 KTJ-100:无创咳痰机 山东济南:山东济南
公司地址	济南市高新技术开发区科创路
联系电话	0531-88950928 18615400579

产品详情

闰凯无创咳痰机KTJ-100

工作原理:

采用医学生理学的吸气正压和呼气负压的原理，配合外部无创的引力使已经纤维化肺部或肌无力导致的排痰困难，轻松将痰液或异物排出的技；

闰凯无创咳痰机KTJ-100

主要性能：

呼气压力：连续可调，最大呼气压力应小于7kPa；吸气压力：连续可调，最大吸气压力应小于7kPa；吸、呼气时间：0~5s范围内连续可调；停顿时间：0~5s范围能连续可调；吸气流速：高低两档可调；压力显示范围：-7kPa~7kPa，精度至少为 $\pm 5\%$ ；可手动和自动模式间手动转换；工作噪音： $<75\text{dB (A)}$ 。

性能优势:

- 1、有效治疗COPD等肺疾病的痰液“移动”和非肺疾病的痰液排出
- 2、可通过面罩、口咬器或气管插管连接病人，无创伤性清除病人气道分泌物
- 3、通过设置的压力和时间自动工作，最大限度节省医护工作量
- 4、降低呼吸道感染发病率
- 5、安全、无创而舒适的吸痰替代治疗

咳嗽周期由吸气、呼气、停顿构成

连续给予4 - 6个咳嗽周期（一次循环）

病人休息 20 – 30秒(自主呼吸)

在休息期间，清除在管路中或口咽部可见的分泌物

重复 4 – 6 个循环或直至所有的分泌物被清除

尽可能让病人在呼气向胸腹部用力

常规压力设置: +20cmH₂O/-40cmH₂O, 但要注意根据个体需要

使用频率要根据个体需要