

水疗池、婴儿浴池

产品名称	水疗池、婴儿浴池
公司名称	临沂汇康医疗器械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:三汇 型号:通款 产地:临沂兰山奥斯卡中心大厦
公司地址	山东临沂兰山区商城路166号
联系电话	15563371780

产品详情

水疗是指利用不同温度、压力和溶质含量的水，以不同方式作用于人体以防病治病的一种方法。水疗对人体的作用主要有温度刺激、机械刺激和化学刺激。按其使用方法可分浸浴、淋浴、喷射浴、漩水浴、浴气泡等。水疗在产程中的应用，最早应追溯到1803年。史料记载法国一位准妈妈在分娩过程中感到精疲力竭，而走进热水浴盆中，想放松一下，结果宝宝很快就降生在水里。60年代，前苏联专家开始水中分娩的试验，早期的“水中分娩”多半都是在海水中诞生的。全世界已经有数百人在海水中顺利地生下了婴儿。到80年代后期，美国首家水中分娩中心成立，自此之后，估计美国有6000名婴儿在水中出生。有条件进行水中分娩的医院也从1995年的10家发展到最近的150家。

水疗池的使用说明及安全提示：

1、产品选用环保型PVC材料，独立气囊流线型设计，内壁采用无缝热熔合技术,双层充气水晶底，全安柔软。产品通过美国儿童玩具协会安全测试，对人体无任何毒副作用，可供婴儿及儿童玩耍、娱

乐、洗澡之用，也可供孕产妇水疗使用。切记不可先将开水倒入池内，避免对水池造成损坏。应先放冷水再放热水，温度适合人体洗澡即可。

2、取出产品,展开平铺在地,此时水池内壁呈真空收缩状态,切勿用力撕扯；先打开水池底部气阀进行充气,直至半饱和状态即可，然后依次从下往上对三层气囊分别充气。充好一层就及时将气阀盖严，防止漏气；放气时，打开气阀盖，将放气管插入气阀即可自动放气。

3、南北冬季温差较大，收到物品后请勿立即充气，等待材质略微软化后方可进行充气，防止由于低温造成材质变硬，在外力作用下人为损坏；首次充气应注意达到8分饱即可,以后使用再充饱，可延长产品使用寿命。正常情况一般3-5天定期补气一次；产品第一次充气后，请不要立即使用，新产品刚开始需要一个缓冲过程，2小时左右，待产品充分饱满定型之后再使用，以后就没关系了；使用时地面平整，无尖锐物。清洗时用棉抹布粘肥皂水擦拭，不可使用吹风机，不可使用其他化学水剂。

水疗池在产程中的应用

一、水疗促进产程进展的原理

1.温度刺激

2.物理刺激：肌肉松弛，缓解肌肉痉挛与疼痛；增加血液循环；水的浮力有利于身体移动；增加全身的舒适感。

3.化学刺激：水中某些呈离子状态的化学元素通过皮肤进入人体；附着于皮肤表面的泉水离子通过皮肤上的感受器而引起反射性的刺激作用。

二、产妇适合水疗的前提条件

1.头位足月妊娠，无并发症

2.估计胎儿在1小时内不能分娩者

3.无下床活动禁忌症

4.宫口开大 3cm

5.胎膜未破，无明显阴道出血

三、水疗在产程应用达到的效果

1.更好的减轻疼痛

2.增加舒适感

3.促进产程加快

四、水疗应用注意事项

1.严格掌握适应症与禁忌症，水温应保持在摄氏37-38 ，环境温度26-27 ，注意定期监测产妇的体温/胎心/宫缩情况，水疗时间控制在90分钟以内。

2.应用水疗过程中严密观察并询问产妇的感受，产妇出现不适要及时报告医务人员，水疗可加速产程，要做好应急准备，严格清洁消毒使用后的浴池/椅子等。

3.在水疗过程中补充水分与营养，胸前区要露出水面，减轻静水压对心功能的影响，注意安全预防跌倒、烫伤、着凉等，视每个产妇的个体及产程的不同阶段选择合适的水疗方法。

关键词：水疗池报价厂家如果[分娩助产用水疗池水中分娩用

]描述

不够全，请

联系我司获取详细资料

，请说明是从顺企网看到的，会有更多优惠相关链接：[临沂企业网](#) [临沂孕妇产前后用品批发](#)