

鱼跃402AI 超声雾化器 加湿器 假一赔三

产品名称	鱼跃402AI 超声雾化器 加湿器 假一赔三
公司名称	刘儒婧（个体经营）
价格	240.00/件
规格参数	品牌:鱼跃 材质:塑料 货号:402A1
公司地址	中国 河南 信阳市平桥区 1688
联系电话	0086 376 6551078 13193862261

产品详情

品牌	鱼跃	材质	塑料
货号	402A1	规格	240 × 130 × 200
箱装数量	一台/件	产地	江苏
是否提供加工定制	否		

运费提示：标价是宝贝净价不包含运费！！此宝贝较重2.3公斤所以亲在拍时先查看一下下面的运费情况自己添加运费谢谢合作！！

超声雾化器能将水溶剂药物雾化成极微小的雾粒，作为病人气雾吸入治疗或表面病灶喷药治疗，对鼻炎、咽炎、急慢性支气管炎、肺气肿、哮喘、肺部或皮肤感染等有显著疗效，是国内外医院内外科、儿科、五官科、皮肤科以及养老院等单位必备的医疗设备

鱼跃雾化器402ai超声雾化器

[装箱清单] 主机：1台；面罩：1只；咬嘴2只；晶片1只；波纹管3根；鼻炎管1只；波纹管接头2只；防反流接管2只；洁面美容喷嘴1只；熔断丝4只；振荡膜片（大、小）各5片；说明书、保修单、合格证各一份；

[主要技术指标] 超声频率：1.7mhz+-10%连续工作时间：>=4小时消耗功率：50w小雾化杯最大装药量：150ml大雾化杯最大装药量：350ml最大雾化率：>=4ml/min电源电源：ac220v + - 10%

[使用注意事项] 在正确的使用情况下，雾化片的使用寿命约3000小时，且极易更换。其使用寿命还与

水的质量有关，如果雾化片上沉积了水垢，请用柔布清洗。根据不同的水质和使用目的，可以选用不同的雾化片，如水质较硬的地区选用覆不锈钢的雾化片，要求耐酸的使用环境选用玻璃釉面的雾化片。雾化器具有断水自动保护功能，当水位低于水位开关时，雾化器会自动停止工作。雾化器工作时，请勿把手置于雾化片上方，因高频震荡，手会有刺痛的感觉，但这不是电的冲击或漏电。雾化器的正确使用步骤为：将雾化器放入装了水的容器内 雾化器的电源连接线接入变压器 再将变压器的插头接入电源即可。特别提醒：不要在雾化片表面没水时，将雾化器接入电源，因为电路启动的脉冲电流在雾化片没有水的状态下会少坏雾化片。

鱼跃雾化器——保持空气湿度，防止干燥，洁面美容。空调房间，暖气房间里的必备超值首选。既享受空调暖气的温度，又享受极其舒服的湿度。

“鱼跃牌雾化器”还有以下妙用——

1 水箱中加入食醋,可预防感冒；2 水箱中加消毒药水,为室内清洁消毒；3 水箱中加消炎药接管治疗呼吸道疾病；4 水箱中加入庆大霉素可治疗呼吸道发炎；5 治疗干眼病,医生说用雾化器熏眼睛,效果很好；6 水箱中滴入一二滴熏衣草精油,提高睡眠质量；7 水箱中加入薄荷精油或花露水，有效缓解幼儿鼻塞；8 在水箱中放入板兰根可预防感冒；9 将抗病毒口服液或双黄连口服液加入水箱中，能有效预防流感；10 把口、鼻对着雾化器的雾气深呼吸,改善鼻塞、咽干、口干症状；11 朝向雾化器的出气口5-10分钟对皮肤有镇静、补水的功效；12 水箱中加入少许香水,玫瑰精油可以香熏；13 敷面膜的时候，配上雾化器会吸收更好；14 让雾化器蒸汽轻轻喷在脸上补充水分再擦护肤品；15 家庭用美容器，美容效果更好；16 化完彩妆,让水雾在脸上喷两下,既保湿又定妆；17 给头发喷雾加湿后再打定型水又蓬松又方便；18 雾化器中加少量桔子皮可以为室内加香；19 居室加湿,让木质器具不变形；20 新装修后的房屋，将醋加入雾化器可减轻装修的气味；21 干燥季节装修时，房内放置雾化器，可防止刚刷的墙面开裂；22 雾化器有清洁首饰的功能；23 烫伤可以用雾化器的喷雾喷，降温止痛；24 在水箱中加入几滴食醋,有效减少水箱中沉积的水碱；25 待熨衣服放在加湿器喷雾口，更方便熨烫；26 花店用雾化器保鲜；水果店也可用雾化器来保鲜；27 对电脑屏幕喷雾清除辐射和静电灰尘；28 切洋葱时,在旁边开雾化器,可避免流眼泪；29 用雾化器吹信封上的邮票可以保证票面完整；30 可当喷水壶湿润花叶；31 天气干燥,绘图机罢工，放了一台雾化器,机器好多了；32 罐子里的食糖久了不容易拿出来,可以用雾化器雾化变软后拿出。

雾化治疗：雾化吸入疗法主要指气溶胶吸入疗法。所谓气溶胶是指悬浮于空气中微小的固体或液体微粒。因此雾化吸入疗法是用雾化的装置将药物（溶液或粉末）分散成微小的雾滴或微粒，使其悬浮于气体中，并进入呼吸道及肺内，达到洁净气道.2化气道.局部治疗（解痉.消炎.祛痰）及全身治疗的目的。除了治疗作用外还具备一机多用的特点雾化吸入、室内加湿、洁面美容，更适合家庭使用室内加湿的作用：随着人们生活水平提高，空调广泛使用，导致皮肤紧绷、口舌干燥、咳嗽感冒等空调病的滋生。本产品雾化过程中，释放大量的负氧离子，能有效增加室内湿度，滋润干燥空气，并与空气中漂浮的烟雾、粉尘结合使其沉淀，能有效除去油漆味、霉味、烟味及臭味，使空气更加清新，保障您和家人的健康。也达到了滋润空气，净化环境的特点！洁面美容的作用：炎热的夏季和异常干燥的冬季，导致人的皮肤水份过度流失，加速生命的衰老，湿润的空气才能保持生机盎然，本产品创造有雾的氧吧，滋润肌肤，促进面部细胞血液循环和新陈代谢，舒缓神经紧张、消除疲劳，使你容光焕发。香薰理疗的作用：在水中添加植物精油或药液等，随水雾散发，满室生香，使身体更易吸收，有治病养神，保健理疗效果，尤其对于皮肤过敏、失眠、感冒、咳嗽、哮喘具有极佳的辅助效果，是传统香薰产品的最佳换代选择。[雾化器]又称喷雾器（sprayer）。火焰原子发射及吸收光谱分析时，利用压缩空气或其他助燃气体将试液雾化为均匀、微细雾珠，并稳定、有效地喷入火焰的装置。气动的雾化器有直角型和同心圆型；此外还有超声雾化器对雾化器的要求是：喷雾稳定，雾滴微细，单位时间内导入火焰中雾量大，雾化效率高。

[什么是超声波雾化器]超声波雾化器利用电子高频震荡（振荡频率为1.7mhz或2.4mhz，超过人的听觉范

围，该电子振荡对人体及动物绝无伤害），通过陶瓷雾化片的高频谐振，将液态水分子结构打散而产生自然飘逸的水雾，不需加热或添加任何化学试剂。与加热雾化方式比较，能源节省了90%。另外在雾化过程中将释放大量的负离子，其与空气中漂浮的烟雾、粉尘等产生静电式反应，使其沉淀，同时还能有效去除甲醛、一氧化碳、细菌等有害物质，使空气得到净化，减少疾病的发生。

[关于物流]本产品的发货时间为您当天4点前拍下的。我们当天发货4点后拍下的。我们次日发货。但并不对到货时日进行任何保证！由于现国内的物流快递都是民营企业，而且每个地方都是承包制避免不了每个地方的服务情况不同，还有像天气原因，节日放假等一些原因都会造成到达时间不固定。遇上与快递有关的任何问题，您都可以联系我们。我们会出面与快递公司交涉，解决您的问题。

[关于售后]我们出售的产品均为正规的产品，请买家购买前一定仔细阅读“买家必读”，产品出厂检验会贴在商品背面，质保卡在英文说明书中。本店所有产品实行7天退换，3个月免费维修，一年成本维修。免费保修期间运费各付，退换货买家承担来回运费(除产品质量问题)，同时本店乐于零利润为您提供超出保修范围之外的维护保养服务和技术支持。

[关于收货]本店铺会为产品严格包装，并和快递公司有长期的业务合作关系，尽一切努力减少路途中损坏的可能。即使保护得再到位，也会有万一的可能性。如果因运输途中损坏或丢失，本店铺负责重新给您补发，但前提为签收时必须在当快递员面前开验货，确认外观数。一旦有问题请拒绝签收并立即通知本店（请不要事后通知，因为我们无法查证）。快递公司会将物品退回到本店。若已经签收则表明您对商品无异议。请严格按照约定执行，我们也将严守承诺！如果您和快递产生不愉快，买方不能因此拒绝付款或者给中评和差评。

[关于换/退货]买家对产品有任何的不满意，当然您必须保证商品各方面都完好无损不影响我们二次销售，拍下后7天可退，15天可换！偏远地区时间可增加7天（退回运费自理，另加我们的运费包装费等）收到货物后我们会第一时间确认您的申请。（开发票的商品发票费用不退还）

中国名牌

产品技术或配置变化，恕不另行通知，谨以最新技术资料及检验结果为准。

超声雾化器能将水溶剂药物雾化成极微小的雾粒，作为病人气雾吸入治疗或表面病灶喷药治疗，对鼻炎、咽炎、急慢性支气管炎、肺气肿、哮喘、肺部或皮肤感染等有显著疗效，是国内外医院内外科、儿科、五官科、皮肤科以及养老院等单位必备的医疗设备。

产品技术或配置变化，恕不另行通知，谨以最新技术资料及检验结果为准。

中国医疗器械行业中的第一个“中国名牌”

iso13485国际质量体系认证

美国fda认证

欧盟ce品质认证

日本国sg安全认证

常见病症配方用法（仅供参考）

一.急性：咽炎，喉炎，气管炎：

配方：1，庆大霉素8万单位+地塞米松5mg加生理盐水至16毫升

2，氯霉素0.3克加生理盐水至15ml

3，红霉素0.3克加生理盐水至15ml

用法：雾化吸入，每日1--3次，3--5天一个疗程。症状缓解后减量，再用2--3天后停药，病情严重时需配合其他治疗。

二.慢性：咽炎，喉炎，气管炎，支气管炎

配方：1，庆大霉素8万单位——糜蛋白酶15毫克加生理盐水至 15ml2，20%痰易净10ml+氨茶碱0.25克

用法：雾化吸入，每日1--2次，每次10--15分钟

三.流行性感冒，普通伤风感冒，急性鼻炎发作

配方：1，白醋5ml+生理盐水至10ml

2，大青根2ml+1%麻黄素10ml+生理盐水10ml

用法：雾化吸入，每日1-2

加湿器/抽湿器品牌: 鱼跃型号: 402a1加湿/抽湿器分类: 加湿加湿/抽湿器适用: 家用适用面积: 11-20m²加湿器功能: 负离子 香薰 超声波 纯净加湿加湿器外形: 其他电源方式: 交流电

主要技术参数：

超生频率：1.7mhz ± 10%

连续工作时间： 4小时

消耗功率：50w

小雾化杯最大装药量：150ml

大雾化杯最大装药量：350ml

最大雾化率：4ml/min

电源电压：ac220v ± 10%