

高清猪牛羊动物B超机

产品名称	高清猪牛羊动物B超机
公司名称	河南优力牧农业科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区经七路21号4002室（注册地址）
联系电话	15981891957

产品详情

高清猪用B超今日价格多少钱甘道夫猪用B超特点具有屏幕大清晰度高操作方便单易学免费培训包教包会
让你零基础快速成为猪用B超行家厂家直销终身保修等众多优势甘道夫猪用B超如图所示：甘道夫猪用B
超主要功能如图甘道夫猪用BGDF-A5

标配探头：3.5MHz防水机械扇扫；

zui大探测深度(mm)：192

轴 向： 2（深度 80）

盲区（mm）： 8

几何位置 精度（%）：横向 20

纵 向： 10

监视器尺寸（英寸）：5.0 TFT-LCD

显示模式：B、B+B、B+M、M

图像灰阶：256 级

图像倍率：x1.0、 x 1.2、 x 1.5、 x 2.0

图形存储：128 张

深度（mm）：120~190，8级可调

测量功能：距离，周长，面积，体积，心率，孕龄

字符显示：病例编号，年龄

电池容量：2200mAh

主机功耗：25W

适配器功耗：45W

主机重量（不含探头）：800g

伪彩显示：灰、红、黄、蓝

甘道夫猪用B超在猪场使用方法：高清猪用B超今日价格多少钱猪用B超使用方法：一步对被测母猪进行保定：母猪一般不需保定，只要保持安静即可。姿势是侧卧比较好，爬卧、站立或采食时均可。第二步猪用B超探查部位：体外探查一般在下腹部，后肋部前的乳房上部，从最后一对乳腺的后上方开始，随妊娠增进，探查部位逐渐前移，最后可达肋骨后端。猪被毛稀少，探查时不必剪毛，但要保持探查部位的清洁。第三步猪用B超探查方法：体外探查时，探头紧贴腹壁，妊娠早期探查，探头朝向耻骨前缘的骨盆腔入口方向，或呈45度角斜向对侧上方。第四步猪用B超测孕诊断：母猪妊娠早期(18~21d)子宫中出现孕囊，内含早期胎水，量少，呈小的圆形暗区，暗区的直径不到1.0cm或1.0cm以上，通常为一暗区或2~3个相邻的暗区，位于膀胱暗区的前下方。随着妊娠的进展，暗区不断扩大成多个不规则圆形、椭圆形的暗区。妊娠25d后可在孕囊暗区内扫查到胚斑反射，呈椭圆形低强回声光团，在胚斑中一般可同时观察到有规律性、快速闪动的线性亮点，此为心管搏动。未孕母猪未孕子宫角位于膀胱的左右和前下方，膀胱腔内为无回声、较规则的液性暗区，未妊娠的子宫角壁对超声的反射弱，其断面声像图呈各种不规则的圆形弱反射区，但要注意观察其界限，以与肠管的断面声像图相区别。1周后应复查，避免误诊。母猪不同阶段的测孕超声图像如图所示：高清猪用B超今日价格多少钱更多猪用B超使用方法猪用B超今日报价多少钱一台快来咨询甘道夫猪用B超品牌厂家