

深层肌肉刺激仪DMS缓解肩部和颈部方法

产品名称	深层肌肉刺激仪DMS缓解肩部和颈部方法
公司名称	山东沐恒医疗科技有限公司
价格	12.00/台
规格参数	品牌:沐恒
公司地址	高密市人民大街1777号
联系电话	15689810326

产品详情

深层肌肉刺激仪DMS

开始对患者使用DMS深层肌肉刺激仪，你需要准备一张治疗床或一把座椅和一张可以放电源的桌子或柜子以及一块干净的折叠好的柔软毛巾。患者躺在床或座在椅子上治疗。电源要放在桌子或柜子表面上，不要放在地上。

深层肌肉刺激仪DMS

颅底（横窦及枕骨下方肌肉）

患者闭上眼睛，使用时手法要轻柔。

2.颈部 -（双侧）

3.肩部（扳机点，斜方肌）

A.右臂从胸前过，搭到左肩上方（在右侧肩胛内侧和菱形肌处使用）。

B.换个方向，在左侧使用。

4.患者的右手搭在头顶上，轻轻地将肘部向后拉，在腋窝后方及斜方肌下部使用。

5.在任何柔弱处再次使用。

6. 确保再次向患者强调多喝水，治疗进程的一部分。

深层肌肉刺激仪DMS