

液体药物恒温箱

产品名称	液体药物恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联液体药物恒温箱 型号:FYL-YS-280L液体药物恒温箱 产地:北京液体药物恒温箱现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

液体药物恒温箱福意联公司注于恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冷藏运输等各种温度控制设备的发展，广泛用于实验室、科研、检验检测、食品、化工等行业，产品种类多、美观耐用，品质可靠。-----适用范围：主要适用于手术室、输液室、急诊科、神经内科、ICU、注射科等科室。用于对生理盐水、冲洗液、腹透液、甘露醇等各种药液的加温及恒温保存等，温度2~48 之间任意调节，满足物品不同液体的加温、恒温要求。-----

-----液体药物恒温箱使用方法：产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列本产品是加温恒温设备，它由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品加温的目的，减轻病人因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。随着手术室护理的不断发展，术中各种保温措施已受到广泛重视，患者术中因输入低温液体及应用低温冲洗液，造成术中出现寒战、低体温等一系列症状.患者在术中应用加温的输液液体和冲洗液，能减少对机体的冷刺激，维持患者术中生命体征的平衡,减少术中寒战、低体温、术后出等,促进患者术后康复。维持患者术中体温的稳定，是手术顺利进行的重要保障。(来源网络) 液体药物恒温箱参数：产品型号:FYL-YS-280L产品形式:立式气候类型:N,SN冷却方式:全风冷噪音：44dB(A) 额定功率：160W温度范围:2-48 电源(V/Hz)：220V/50Hz温控方式：微电脑控温温度显示：LED液晶数字显示制冷剂：无氟制冷剂外形尺寸:(宽×深×高)：595×570×1445mm内径尺寸:(宽×深×高)：520×440×1230mm箱体材质：钢板，表面喷涂门体：三层强度中空玻璃门隔板配置：5个可调节搁架外门锁扣：安全锁一套温度锁定功能：有温度报警：低温报警传感器故障报警：有断电报警：有福意联拥有恒温系列(4-38℃, 2-48℃, 37℃, 0-100℃)等各温度段的系列产品；智能电脑控制器系统，自动温度补偿加热器，智能控制风扇强制冷气循环系统，温度控制，亮度数码显示，在2~48℃范围内任意设定，报警系统；制冷系统采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度稳定均匀；采用板管式蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。(具体信息请根据机型选择) 福意联常用系列型号:

型号

容积

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-50L

50L

85W

4-38

430 × 480 × 510mm

25KG

FYL-YS-100L

100L

85W

4-38

480 × 490 × 840mm

31KG

FYL-YS-138L

138L

85W

4-38

540 × 550 × 840mm

40KG

FYL-YS-150L

150L

100W

2-48

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

280L

160W

2-48

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

430L

160w

2-48

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-151L

150L

120w

0-100

595 × 565 × 860mm

64KG

FYL-YS-281L

280L

160w

0-100

595 × 565 × 1440mm

99KG

FYL-YS-431L

430L

200w

0-100

595 × 675 × 1795mm

129KG

FYL-YS-828L

828L

360w

2-48

1265 × 680 × 1823mm

238KG

FYL-YS-1028L

1028L

360w

2-48

1265 × 680 × 2115mm

268KG

主要特征：1.微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 2.风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48 3.智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性4.PTC陶瓷复合加热技术，加热温定，均匀制冷恒温效果好5.采用压缩机，静音，运转平衡，使用寿命长6.箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温效果出众7.三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，易于观察8.适合温湿地区，外门防凝露技术（根据机型）9.安全门锁设置，防止随意开启，保护物品使用安全10.嵌入式，箱体钢板喷涂工艺，美观实用福意联: 使用注意事项：1、储存温度要求的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间调整。一般情况下，可能需要1-2小时温度为准确。4、产品在设定的恒温过程中

，具备低温报警，温感故障报警等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控提存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）