

# 急救车专用干雾过氧化氢空间消毒灭菌器

产品名称	急救车专用干雾过氧化氢空间消毒灭菌器
公司名称	杭州美卓生物科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美卓 型号:DF-3 产地:杭州
公司地址	杭州市滨江区西兴街道楚天路270号1幢三楼
联系电话	0571-86500029 18072756351

## 产品详情

现状阐述：救护车日常需要清洗消毒灭菌，正常情况下，每天都要对待命的救护车救护仓进行整体清洗和表面消毒，救护仓清洗过后，对表面擦拭消毒有诸多不便，比如：消毒液使用量大，擦拭工作时间长，消毒液异味对人体的刺激性等等。

本文介绍的美卓救护车专用过氧化氢消毒器DF-3，可以有效的解决救护仓清洗过后的表面消毒的诸多问题，同时也可以对救护仓内的空气进行消毒灭菌。

产品介绍：

### DF-3壁挂式干雾过氧化氢灭菌系统

符合欧盟认证、FDA认证要求。单套设备灭菌空间10m

产品特点：可以控制消毒液以干雾的形式喷出，干雾颗粒大小控制在 $7.5\mu\text{m}$ 左右，减少凝结液滴的危险，确保对复杂区域的渗透和消毒效果，能有效达到消毒空间的所有区域；

无线遥控，结构坚固，维护简单，每次灭菌完成设备自动关闭；

自带电池，无需电源，插上压缩空气即可使用，一次充电可连续灭菌50次左右；

体积小，便于安装，壁挂式，不占用使用空间；

消毒空间10m，适宜小空间环境的高水平消毒，如急救车，传递间等；

达到六个对数的芽胞杀灭率，适用于流感病毒、SARS、埃博拉病毒等各类微生物的杀灭，保障人员安全；

整个消毒喷雾过程控制在30min以内，与人工擦拭相比，大大缩短了消毒时间；

设备安装模式：设备小巧，灭菌时可以壁挂（将设备固定挂在救护仓内），也可以将设备放在救护仓桌面上，如图

设备公用介质：氧气瓶（配国标或德标压缩气快接接头）

使用流程：设备安装——加消毒液——气管连接——关闭门窗——遥控器开启设备——喷雾消毒——开门窗换气

整个过程无需人为参与，灭菌完成后设备自动停止工作