曲阜辰达LED手术无影灯厂家直销

| 产品名称 | 曲阜辰达LED手术无影灯厂家直销 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 曲阜辰达医疗器械有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:曲阜辰达 型号:LED无影灯 产地:山东 |
| 公司地址 | 曲阜东经济开发区圣阳路东首 |
| 联系电话 | 15166774000 |

产品详情

1、结构组成:

本公司生产的手术无影灯系列产品为整体反射冷光源式,主要由底座、旋转臂直灯管、平衡臂、y型管、灯体、调光电路系统所组成;灯体由灯壳、灯帽、整体反射光路系统及聚焦系统所组成;调光电路系统由熔断器、开关电源和微电脑调光器等组成;整体反射光路系统由灯泡、灯座、整体反光器等所组成;聚焦系统由手柄、丝杠、行程套、升降套等所组成。

本公司生产的手术无影灯系列产品为整体反射、冷光型,灯壳直径分别为500mm和700mm,灯壳上部的灯盖一律采用圆弧形,既可保护内部元器件,又可防止积尘,美观大方。

手术无影灯的规格型号表示的意义如下表:

规格、型号

描述

lk/zf-700/500

双灯卤素灯、整体反射子母700/500吊式无影灯,灯头直径分别为700±15mm,500±15mm

lk/zf-700/700

双灯卤素灯、整体反射子母700/700吊式无影灯,灯头直径分别为 700 ± 15 mm, 700 ± 15 mm

lk/zf-700

卤素灯、整体反射700吊式无影灯,灯头直径分别为700±15mm

卤素灯、整体反射500吊式无影灯,灯头直径分别为500±15mm

2、产品性能:

Ik/zf-700/500 ,Ik/zf-700/700, Ik/zf-700 ,Ik/zf-500手术影

灯采用吊式,可悬挂于手术室房间顶子或大梁之上,以减少占地面积,操作轻便灵活,平衡臂采用国产或进口弹簧平衡装置及四维平衡臂,旋转关节一律采用优质轴承旋转,并装有刹车装置,在任何位置均可取得平衡定位。

各部位旋转角度:旋转臂直灯管绕固定座转动连续360°,平衡臂绕旋转臂直灯管转动<520°,平衡臂上下移动<60°,y型管绕平衡臂转动<520°,y型管左右转动<300度,灯体绕y型管转动<300,在以上角度内能任意调节,取得平衡定位。

各部位起动力和推力:各部位转动时垂直位移最大作用力不超过55n,其他轴向的作用力不超过25n。

产品工作原理:手术无影灯系列产品采用整体反射光路系统,从不同方向射向一齐,灯体距手术部位光束能在800-1200mm距离内聚焦,照明面积可在120-260mm内任意调节,光柱深度不小于600mm,照度在4万-16万lx间可调。

由不同方向的光束射向一齐的光斑能很好地消除医护人员头、肩、手所形成的阴影,柔和而不炫目,从而达到无影的目的,医务人员无眩晕感,病员伤口无灼热感,伤口容易愈合。

【主要技术指标及参考数据】

技术指标及数据名称

规格、型号

500灯头

700灯头

中心照度(lx)

<160000

<180000

光斑分布直径 d50

>260mm

>260mm

光斑直径 d10

| >120mm |
|-------------------------------------|
| >120mm |
| 单遮板剩余照度(lx) |
| <5000 |
| <24000 |
| 双遮板剩余照度(lx) |
| <18000 |
| <40000 |
| 深腔管剩余照度(lx) |
| <40000 |
| <92000 |
| 单遮板深腔管剩余照度(lx) |
| <4000 |
| <10000 |
| 双遮板深腔管剩余照度(lx) |
| <12000 |
| <30000 |
| 光柱深度 |
| <500mm |
| <600mm |
| 色温 (tc) |
| 3000k <tc<6700k< td=""></tc<6700k<> |
| 显色指数(ra) |
| 85 <ra<100< td=""></ra<100<> |
| 辐照度(w/m²) |
| >650 |

| 辐照度和照度比值 | 直 |
|----------|---|
|----------|---|

连续运行

电源电压

ac220v 50hz

输入功率

350va

350va

灯泡使用电压

24v, dc

灯泡功率

卤素灯100w

卤素灯150w

房顶高度

吊式2.8-3.2m,可根据用户实际定做

灯体直径

 $500 \pm 15 \text{mm}$

 $700 \pm 15 mm$

说明:光斑直径d10表示照度达到中心照度10%的圆的直径。

光斑分布直径d50表示照度达到中心照度50%的圆的直径。

【安装调试】

- 一、固定式(吊式)的安装:
- 1、安装在天花板上时,要求在天花板混凝土中预埋四根m12 x 200mm锣栓,露出天花板30mm(直径240圆周上,360度四等分),以便安装固定圆盘和固定座。亦可用不小于直径20mm圆钢锣栓吊装固定圆盘。然后安装固定座。
- 2、安装在梁上时,可做一个直径不小于320mm,厚度不小于6mm的吊装底盘,在直径240mm圆周上,360度四等分,钻直径12.5孔四个;在盘的两侧依梁的宽度,各焊一块垂直于底盘,尺寸不小于150×90mm,厚度不小于5mm的梁夹板,在梁夹板上按三角形的样式靠上部钻直径14.5孔三个,安装时夹于梁上,

用m10膨胀螺栓固定,以便安装无影灯底座。

3、线路的连接:

开关电源与供电线路220v、50hz两相分别对应接好,底座上部有一组两色线路,要分别接在开关电源输出端的正负极线路上(红色接正极);如为子母式或孪生式还有一组要分别接到另一台开关电源的正、负极上,在安装横臂管、平衡臂、y型管、及灯体时分别将导线对应连接好。(红色对红色,其他颜色相接)。