

甘露醇回温箱

产品名称	甘露醇回温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联甘露醇回温箱 型号:FYL-YS-151L\281L\431L 产地:北京甘露醇回温箱现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

甘露醇回温箱福意联公司始终坚持以“市场为导向，以质量信誉求生存，以科技求发展的经营理念。确保用户利益为前提实现双赢为目标。福意联人将以合格的产品品质，的管理，贴心的服务，积迎接挑战。竭诚欢迎各界朋友前来洽谈、合作。

甘露醇回温箱用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联常用系列型号：

型号：FYL-YS-150L温度：2~48 尺寸：595×570×865mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-230L温度：2~48 尺寸：595×590×1215mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-280L温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-310L温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-430L温度：2~48 尺寸：595×680×1805mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-151L温度：0~100 尺寸：595×565×860mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-281L温度：0~100 尺寸：595×565×1440mm（每度可调控）

型号：FYL-YS-431L温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm（每度可调控）

福意联拥有恒温系列（4-38，2-48，37，0-100）等各温度段的系列产品；福意联凝心聚力推出的产品背后，让用户青睐的是福意联产品的用心和注，品质和服务，便捷的将是我们不断便捷和回馈广大用户朋友，非常感谢广大用户朋友一直以来的青睐，正是有了大家的肯定和赞扬，才奠定了福意联在市场中的重要位置，未来发展道路，福意联企业会继续用“融入民心、造福社会”的理念推出产品！（具体信息请根据机型选择）

甘露醇回温箱产品从结构分为：嵌入式和落地式两个系列

本产品是加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品加温的目的，减轻病人因输液或手术过程中液体温度过低而产生的不适反应。本实用结构合理，使用方便，可调可控。

使用方法：（只做简单建议，实际以现场使用为准）

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。说明：放入之前应确保液体包装完好不破损。

3、先空箱运行，将面板温度调节至需要的温度，并按锁制键，待温度稳定后将药液放入，以免误操作引起温度过高或过低。

4、根据药液的使用量和来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加

甘露醇回温箱参数：

1.规格参数：

2.产品型号：FYL-YS-281L

3.产品形式：立式

4.噪 音：46dB (a)

5.功 率：160W

6.电压/额定频率：220V/50Hz

7.温度范围：0-100 每一度恒温调节

8.玻 璃 门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度

9.外形尺寸（宽×深×）：595×570×1445mm

10.内径尺寸（宽×深×）：508×422×1218mm

11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度

13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

14.安 全 锁：双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。

17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱 体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

福意联：

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。

2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间调整。一般情况下，可能需要1-2小时温度为准确。

4、产品在设定的恒温过程中，具备高低温报警，温感故障报警等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）