

荷兰猪精子密度仪，世博猪人工授精设备齐全

产品名称	荷兰猪精子密度仪，世博猪人工授精设备齐全
公司名称	世博（青岛）畜牧设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市福州北路129号
联系电话	0532-55717586

产品详情

荷兰猪精子密度仪，世博猪人工授精设备齐全

精子密度仪使用手册

- 1、准备1升荷兰稀释液并让它的温度维持在35 。
- 2、稀释液准备好后（即稀释粉溶解至少30分钟后）开始采集精液并测出精液的体积和重量。
- 3、把稀释液装入透明的检测小瓶，只需装到2/3容量即可，此瓶命名为R瓶即参考瓶。
- 4、把采集到的精液小心缓慢地加入到稀释液里面，确保轻轻的搅动使其彻底混合均匀。
- 5、把稀释好之后的精液装入透明的检测小瓶，只需装到2/3容量即可，此瓶为检测瓶T瓶。
- 6、检测瓶的盖子盖紧后，将瓶转动2-3次，以确保精液均匀。
- 7、开机后，将参考瓶（R瓶）（即只装稀释液的瓶子）放在机器上，并按“R”键清零。
- 8、然后把检测瓶（T瓶）（即装了稀释好之后的精液的瓶子）放在机器上，并按“T”键读数。
- 9、重复上述的7和8两个步骤，取两次读数的平均值。猪精子密度仪
- 10、根据上述读数，参考对照表的表1或者表2来计算精子密度及需要多少荷兰精液稀释粉。