

# MOR金标快速检测试剂盒生产厂家上海凯创生物

产品名称	MOR金标快速检测试剂盒生产厂家上海凯创生物
公司名称	上海凯创生物技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区航头镇工业园区鹤立路
联系电话	18917815157

## 产品详情

凯创吗-啡检测试剂盒应用金标技术，一步法定性快速检测人体尿液中出现的吗-啡，可通过肉眼直接观查结果，检出阈值为300ng/ml。本产品仅供专业人员使用。

本产品仅提供初步的检测结果，未经培训的非专业人员可能错误判断结果。结果的确定必须用精确的化学分析方法获得。美国国家药物滥用研究院推荐的首选确认方法为气相质谱检测（GC / MS）。当初筛结果阳性时，必须用该方法加以确定，并结合临床症状由专业医师作出判断。

阿片类药物如海洛因、吗-啡及可待因均由罂粟果实的树脂中提炼出来。由于海洛因及可待因均在体内迅速代谢为吗-啡及葡萄糖吗-啡。因此，吗-啡的存在并超过阈值说明了患者曾服用超过剂量的海洛因，吗-啡或可待因。

对滥用药物的尿液筛检方法很多，包括简便的免疫检测，复杂的化学分析方法。胶体金免疫层析法以其快速、高灵敏度和高特异性使它成为药物滥用尿液筛检中广为使用的方法。

凯创吗-啡检测试剂盒采用免疫竞争抑制法检测尿中吗-啡的存在，即蛋白标记的毒品（毒品载体）同尿液中存在的毒品竞争有限的抗体结合位置。在检测卡内放置一条检测试纸条，试纸条检测线区包被了吗-啡载体结合物，在检测区的一端放置了已干燥处理的吗-啡抗体胶体金纸片。如果尿液中无毒品出现，毒品抗体胶体金将随同样品溶液在膜上运行至检测线，与吗-啡载体结合物结合呈现出一肉眼可见的线条，此为阴性结果。如果尿液中含有毒品或毒品代谢物，他们将和毒品胶体金载体在检测区竞争有限的抗体结合位置，当毒品浓度达到一定量时，它将占据所有的抗体结合位点，因而阻止了毒品载体与其抗体胶体金的结合，这样检测区无线条出现，表示结果阳性。

在试纸条上的质控区包被有特定抗原抗体，以表明试剂盒反应系统工作正常。此质控线与毒品或毒品代谢物的存在无关。质控区色带的出现表明： 样品加入量充足 样品在纸条上运行正常。

MOR (吗-

啡) 金标快速检测试剂盒产品网址：<https://www.biochemtron.com/product/dp/2018-09-07/21.html>