

# 无纺布7x7圈3三伏贴三九贴穴位贴天灸贴肚脐贴空白贴

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 无纺布7x7圈3三伏贴三九贴穴位贴天灸贴肚脐贴空白贴   |
| 公司名称 | 山东辰星医疗科技有限公司销售部              |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇高新技术产业园6号（注册地址） |
| 联系电话 | 0537-6933816 13508971623     |

## 产品详情

使用方法:

- 1.先将第一层白色离型纸拉开.
- 2.贴上将产品中央对准伤口敷料.
- 3.贴上后,再撕开第二层离型纸.
- 4.轻施压力将产品抚平并贴合皮肤,为达到最佳防水效果,请压紧产品边缘.
- 5.由边缘凸出撕除层露面薄膜,即完成伤口敷料的防水保护.
- 6.可与不沾黏吸收棉垫使用

注意事项:

- 1.专为洗澡时防水设计,洗澡后请立即移除.
- 2、不可直接贴于伤口上。
- 4.请置于幼儿无法取得之处.

5.此产品为低过敏性。

6.撕除时,请顺着毛发生长方向,单手按压贴后周边皮肤,另一手缓慢轻柔撕除,勿垂直向上接排皮肤。