

# 医用高温压力蒸汽灭菌柜 手术室器械快速消毒锅

产品名称	医用高温压力蒸汽灭菌柜 手术室器械快速消毒锅
公司名称	河南省强人净化工程有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:三强 型号:SQ-Z 用途:消毒灭菌设备
公司地址	河南省安阳市滑县滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区（注册地址）
联系电话	0372-5577505 18803722636

## 产品详情

### 医用高温压力蒸汽灭菌柜 手术室器械快速消毒锅

#### 使用前的准备

#### 器械灭菌前的准备工作

1、在灭菌之前，器械必须冲洗干净，避免血迹以及其他杂质的存在。这些残留物质会对灭菌物品以及灭菌器本身造成危害。推荐清理方法如下：

- （1）使用后的器械应立即清理、冲洗残留物；
- （2）推荐使用超声波清洗机、净化剂或者蒸馏水清洗；
- （3）清理后再冲洗器械30秒。

2、在把器械放入灭菌托盘之前，应确保不同的物品分离并且要放置在不同的托盘中。例如：不锈钢与碳钢

#### 使用须知：

在每一次灭菌之前，要认真进行如下检查；

1.如果使用不锈钢托盘放置碳钢器械，在放置之前，托盘上应当垫上消毒巾或纯木棉纸，避免碳钢和不锈钢直接接触。

- 2.在每一个托盘中放置一个灭菌指示卡。
- 3.每周一次，在负载中放置生物孢子检测指示剂，检测灭菌效果。
- 4.确保在灭菌循环中，器械要保持一定距离。
- 5.器械应放在空敞位置进行灭菌。
- 6.灭菌托盘不允许超载，应保证被灭菌物品不超过托盘体积的70%，以利于蒸汽渗透以及空气的流通。
- 7.需要包裹的器械应选用灭菌袋、灭菌纸、薄纱织物等有助于干燥的包装材料。
- 8.托盘的间隙距离约为45mm，以便蒸汽流畅循环。

#### 橡胶管灭菌前的准备工作

用温水清洗橡胶管，同时确保管子是两头开口的空心管道，没有任何急拐弯、扭曲、扭结。

#### 辅料包灭菌前的准备工作

把辅料包垂直放在托盘或搁网上，避免与灭菌器内壁接触。最大装载量为2/3容积

#### 规格

台式：18L、23L、45L

立式：100L、150L、200L

您好！欢迎光临厂家店铺，可咨询服务热线了解详细规格尺寸和参数