

# 大量批发医用拐杖A康复助行医用拐杖

产品名称	大量批发医用拐杖A康复助行医用拐杖
公司名称	衡水宇晨医疗器械有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品名:宇晨 型号:不锈钢 产地:衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	15369860704

## 产品详情

### 拐杖的使用方法与注意事项

长度的选择：

u 拐杖顶端与腋窝间留有二--三横指宽的距离。手把高度调整至手，肘向内弯曲25-30度。

u 手杖通常单根，握于不便腿脚的同侧手中。

骨科病人术后使用方法：

u 拐杖顶端与腋窝间留有二--三横指宽的距离。手把高度调整至手，肘向内弯曲25-30度。拐杖顶端与腋窝间留有二--三横指宽的距离。手把高度调整至手，肘向内弯曲25-30度。拐杖顶端与腋窝间留有二--三横指宽的距离。手把高度调整至手，肘向内弯曲25-30度。

3. 上下楼梯的拐杖使用方法：

上楼梯：健侧先上，然后患侧与拐杖同时上。

下楼梯：两拐杖同时出，再出患侧将重心下移，然后再出健侧。

4. 注意事项：

u 每次使用前检查橡皮头及螺丝有无变形或损坏，如有损坏应重新更换以维持其安全性。

避免地面潮湿、光线不足及有障碍物时行走，以免滑倒或绊倒。

使用拐杖时应避免穿着拖鞋或高跟鞋。

第一次下床使用拐杖，须有医护人员在旁协助与指导。

站立时，拐杖底部放置于脚尖前十公分，再向外侧十公分处。

行走前先站稳，步伐不宜太大，眼睛向前看不要向下看。

衡水宇晨医疗器械有限公司是生产医疗用品的专业企业，自成立以来，残疾人腋下拐杖厂先后研制了九种新产品，磁疗颈部牵引器，按摩健身球等获得国家专利产品，经过十多年的发展，公司不断提高科研队伍，以开发新产品为发展目标，逐步提高公司产品的科技含量和声誉。残疾人腋下拐杖厂将以优质的

产品、诚信为荣、科技为本、竭诚为各界朋友提供质量可靠的产品和优质的服务。企业宗旨：为人民健康服务 为员工创造机会 为社会创造效益。企业精神：敬业 诚信 团队 创新  
残疾人腋下拐杖厂产品名称：医用拐杖,医用拐杖性能结构：医用拐杖由支架、腋托、握把、螺栓或滚珠、胶垫等材料工制成。按使用材质不同分为铝合金、铁制、不锈钢医用拐杖。医用拐杖适用范围：适用于下肢骨折或损伤患者。医用拐杖使用方法：1、先将医用拐杖从包装中取出，检查各部件连接是否牢固。2、将腋托至于腋下，手握住手把，防滑脚垫着地。3、根据患者需要调节升降支杆的长度和把握的高度，使其达到合适的使用效果。  
残疾人腋下拐杖厂企业使命：创新科技 共享生活，经营策略：研制好产品 提供好服务 创建好品牌

我们的地址：河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村电话：联系手机：15369860704 期待您的咨询